

Аппарат Vela Shape V10


Инструкция по применению



Оглавление

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА (ВВЕДЕНИЕ):	3
МАНИПУЛА 1 ВАКУУМНОГО МАССАЖА + RF ПО ТЕЛУ	4
ДИСПЛЕЙ МАНИПУЛЫ 2(СМ. РИСУНОК) – УПРАВЛЕНИЕ ОДИНАКОВО С МАНИПУЛОЙ 1	4
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ АППАРАТА V10	5
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:	6
БЕЗОПАСНОСТЬ	6
НАЧАЛО РАБОТЫ УСТАНОВКА МАНИПУЛ	7
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ НА ДИСПЛЕЕ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАНИПУЛ И БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ	9
УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ	10
ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР:	10
ПРИНЦИП ВОЗДЕЙСТВИЯ:	11
КУРСЫ ПРОЦЕДУР (ДЛЯ СПРАВКИ):	12
ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ:	12
КУРС ПРОЦЕДУР ПО ЛИЦУ:	12
КУРС ПРОЦЕДУР В ОБЛАСТИ ГЛАЗ:	14
КУРС ПРОЦЕДУР НА ШЕЮ:	15
КУРС ПРОЦЕДУР ПО ТЕЛУ:	16
КУРС ПРОЦЕДУР НА СПИНЕ	17
КУРС ПРОЦЕДУР НА НОГАХ	18
КУРС ПРОЦЕДУР ПО ПЛЕЧАМ:	19

Внешний вид устройства (введение):

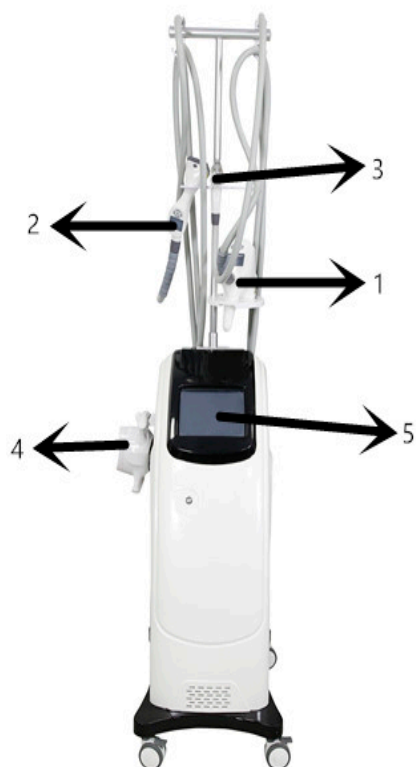


- 1. Манипула 1 вакуумного массажа + RF по телу
- 2. Манипула 2 вакуумного массажа+ RF по рукам и ногам

3. Манипула 3 вакуумного массажа+ RF по лицу
4. Манипула 4 УЗ кавитация по телу «Убийца живота»
5. Цветной сенсорный ЖК дисплей
6. Разъемы для подключения манипул

Манипула 1 вакуумного массажа + RF по телу

1. 1) Управление с помощью клавиш на манипуле 1:
 - А: Нажмите “▲”, “▼” для выбора параметра
 - Б: Нажмите “◀”, “▶” для изменения значений параметра
 - В: Нажмите “Enter” для подтверждения действия
 - Г: Также вы можете менять параметры на главном дисплее
 - Д: Параметры нельзя менять прямо во время работы аппарата
2. 2) Дисплей манипулы 1(см. рисунок)

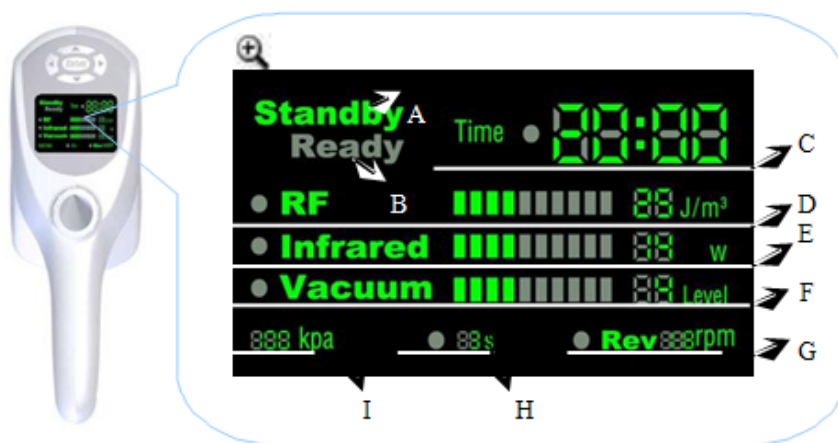

- А) Режим ожидания
- В) Готовность к работе
- С) Время
- Д) Энергия RF
- Е) Инфракрасное излучение
- Ф) Мощность Вакуума
- Г) Скорость роликов
- Н) Режим пульсации
- І) Индикатор давления вакуума

Дисплей манипулы 2(см. рисунок) – управление одинаково с манипулой 1

- А) Режим ожидания
- В) Готовность к работе
- С) Время

- D) Энергия RF
- E) Инфракрасное излучение
- F) Мощность Вакуума
- G) Индикатор давления вакуума
- H) Режим пульсации

Комплектующие аппарата V10



АППАРАТ



**МАНИПУЛА
ПО ЛИЦУ**



**МАНИПУЛА
ПО РУКАМ/НОГАМ**



**МАНИПУЛА
ПО ТЕЛУ**



**МАНИПУЛА
ВАКУУМ + 40K ПО ЖИВОТУ**



**КАБЕЛЬ
ПИТАНИЯ**



**КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ И
УПЛОТНИТЕЛЕЙ**



**БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕ-
НИЯ МАНИПУЛ**

Условия работы и технические параметры:

Условия работы на аппарате

- 1) Температура в помещении 10-30 градусов
- 2) Хранить аппарат рекомендуется при температуре не ниже 0
- 3) Влажность до 70%
- 4) Давление воздуха: 860hPa~1060hPa
- 5) Избегать долгого попадания прямых солнечных лучей на аппарат

Внимание: Не запускать аппарат ,который хранился при температурах до 10 градусов и ниже. Поместите аппарат в комнатную температуру на 2 часа перед запуском.

Технические параметры:

Название	Значение
ЖК дисплей	ЖК дисплей аппарата: 10.4/8" 2) Дисплей на манипулах: Дисплей на манипуле 1: 2.4" Дисплей на манипуле 2: 1.9"
Режим работы	Пульсация
Частота пульсации	0.5s-7.5s
Давление вакуума	1) Абсолютная величина: 80kPa -10kPa (60.8cmHg - 7.6cmHg) 2) Относительное значение: 20kPa -90kPa (15.2cmHg – 68.4cmHg)
Частота вращения роликов	0-36 rpm
Режимы вращения роликов	4 режима
Контроль безопасности	В режиме реального времени
RF частота	1MHz
RF макс энергия	Max: 60J/cm
Длина волны лазера	940nm
Мощность лазера	MAX 20W
Кавитация	40KHz
Кол-во манипул	4
Площадь пятен манипул	4mmx7mm、8mmx25mm、30mmx50mm、40mmx60mm
Потребляемая мощность	750W
Рабочее напряжение	AC230V±10%, 50Hz±1Hz
Вес	72.7KG
Размер упаковки	127*70*75CM
Упаковка	Деревянный ящик
Комплектующие в упаковке	1. Манипула 1 вакуумного массажа + RF по телу 2. Манипула 2 вакуумного массажа+ RF по рукам и ногам 3. Манипула 3 вакуумного массажа+ RF по лицу 4. Манипула 4 УЗ кавитация по телу 5. Кабель питания

Безопасность

Обязательно к ознакомлению персоналу и операторам аппарата! ВАЖНО:

- 1) Не смотреть на лазер
- 2) Убедиться в надежности проводки в помещении. Использовать сетевой фильтр
- 3) После использования отключить аппарат от питания
- 4) Не разбирать устройство
- 5) Использовать сеть с заземлением

Начало работы Установка манипул

- 1) Установите акриловые и металлические подставки под манипулы (идут в комплекте) как показано на фото



- 2) Установите подставки под манипулы на металлической вешалке как показано на рисунке ниже




- 3) Подсоедините манипулы следуя рисункам на задней крышке устройства. Зафиксируйте их болтами.



- 4) Подсоедините шнур питания и включите тумблер питания сзади устройства
- 5) Включите кнопку питания – экран устройства загорится, выберите нужную манипулу (по умолчанию это манипула 1)




- 6) Нажмите «» на манипуле для начала работы

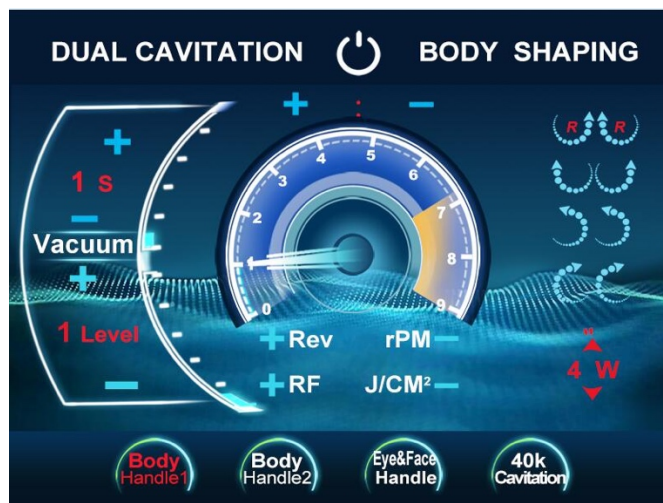

Когда манипула не используется просто отложите её на подставку, не вынимайте манипулы из разъемов во время работы на аппарате.

Настройка параметров на дисплее

- 1) После подключения манипул и питания нажмите на кнопку под экраном
- 2) Через 1 секунду дисплей загорится, и вы увидите рабочий интерфейс устройства

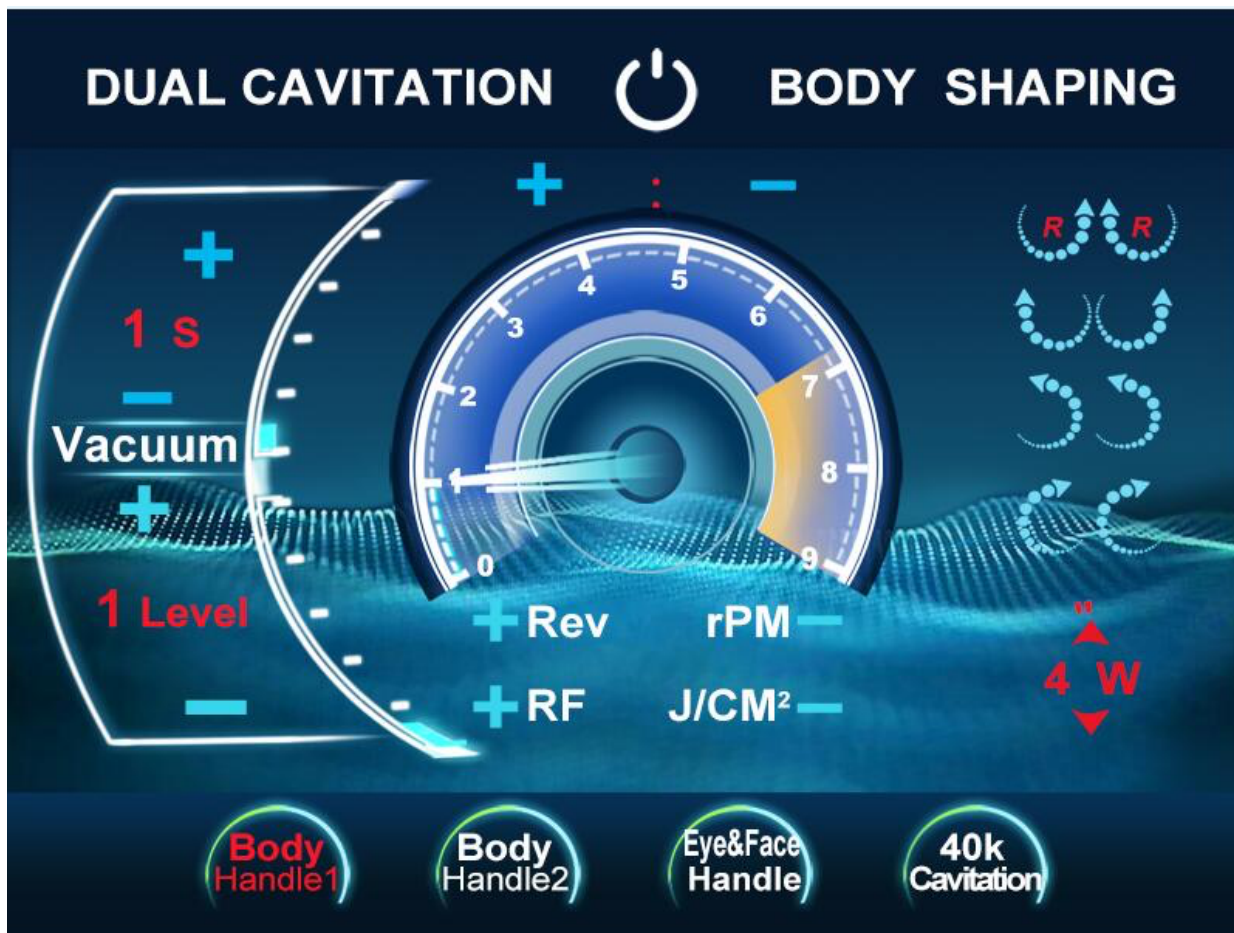

Технические характеристики манипул и базовые настройки

- 1) Технические характеристики манипул

Манипулы	Мощность ИК лазера	Частота вращения роликов	RF энергия	Уровни вакуума	Частота пульсации
Манипула 1	0~20W	0~36 rpm	0~60J/cm ³	1~9	1s ~8s
Манипула 2	0~20W	нет	0~60J/cm ³	1~9	1s~8s
Манипула 3	0~10W	нет	0~50J/cm ³	1~7	1s~6s
Манипула кавитации	нет	нет	Кавитация до 50W	1~7	1s~9s

Управление устройством

Внимание: в инструкции приведен пример на основе манипулы 1, управление другими манипулами происходит по такому же принципу.



- 1) Выберите нужную манипулу
- 2) Установите нужные параметры с помощью экранного меню

Управление на манипулах:

нет

Нажмите кнопку ENTER («А») для начала и приостановки работы.



Важно: Выключение аппарата производить только после остановки процедуры!
Отключение шнура питания возможно только через 10 минут после отключения аппарата.


Протоколы процедур:

Принцип воздействия:

- Инфракрасный лазер уменьшает сопротивление кожи, нагревая кожу, а энергия RF проникает глубоко в соединительную ткань. Эта комбинация инфракрасного лазера и проводимой энергии RF увеличивает проникновение кислорода во внутриклеточное пространство, нагреванию кожу, усилению внутритканевого метаболизма.
- Вакуум плюс специально разработанные ролики увеличивают проникновение энергии RF до 5-15 мм вглубь тканей. В то же время, вакуум и ролики механически разминают и втягивают соединительную ткань, эффективно удаляя подкожный жировой слой, удаляя капиллярную сеть, увеличивая лимфатический дренаж, увеличивая метаболизм. Как результат эффективное улучшение контуров тела.
- Применяемые технологии, позволяют энергии RF проникнуть через любые участки кожи, без повреждения и отрицательного воздействия на мягкие ткани, даже при воздействии в области век.

Показания:

- 1) Удаление темных кругов вокруг под глазами, уменьшение "мешков" под глазами;

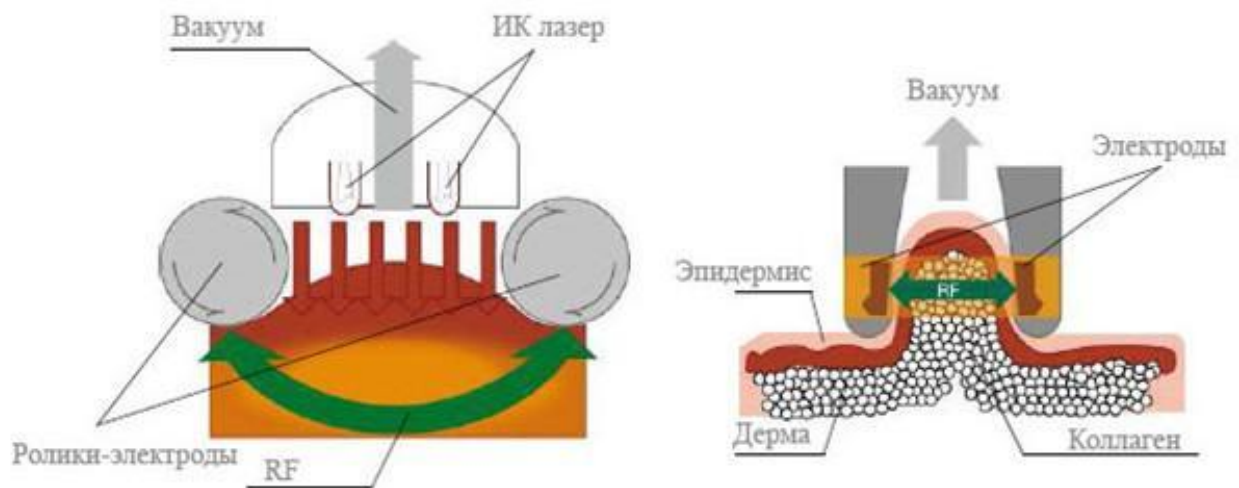

- 2) Лифтинг лица (в том числе лба, верхнего века), удаление морщин;
- 3) Эффективное создание нового контура тела, борьба с целлюлитом;
- 4) Общее снижение веса;
- 5) Восстановительное лечение после тяжелой физической нагрузки, занятий спортом;
- 6) Борьба с растяжками.

В отличие от аналогичных аппаратов других производителей, работа на аппарате не требует использования специальных костюмов для процедур!!!! Все процедуры проводятся с использованием массажных масел. Также возможно проведение процедур по костюму, но в этом случае будут задействованы только 2 технологии (вакуум и ролики) из четырех (рф и ик-лазер через костюм не проходят).

Противопоказания:

1. беременность и лактация,

2. период менструации,
3. фотосенсибилизация,
4. наличие солнечных ожогов и открытых ран,
5. онкологические заболевания,
6. патология сердца,
7. сахарный диабет,
8. наличие в организме пациентов металлических предметов или кардиостимулятора.

Курсы процедур (для справки):

1. По лицу: каждая процедура длится 30 минут, один раз в неделю. Курс включает в себя 10 процедур.
2. Область глаз: каждая процедура длится 15 минут, один раз в неделю. Курс включает в себя 10 процедур.
3. По телу: каждая процедура длится 45-60 минут, дважды в неделю. Курс включает в себя 10 процедур.
4. По определенным участкам тела: каждая процедура длится 15 минут, дважды в неделю. Курс включает в себя 10 процедур.

Подготовка к процедуре:

1. Приготовьте: Фотоаппарат(опционально), очищающее средство для лица, эфирное масло и спиртовой тампон.
2. Перед процедурой: для того, чтобы клиенту лучше был виден эффект от процедуры, рекомендуем, с согласия клиента, сделать фото До и После, в одинаковых условиях освещённости. За неделю до процедуры клиенту не рекомендуется принимать обезболивающие средства.
3. Проведение процедуры:
 - А) очистите участок кожи клиента для процедуры
 - Б) Нанесите массажное масло
 - В) Установите нужные параметры и начните процедуру
4. Настройка параметров: регулируйте параметры, чтобы избежать дискомфорт у клиента. Все зависит от болевого порога и чувствительности кожи.

Курс процедур по лицу:

1. Цель: фейс-лифтинг и подтяжка кожи: каждая процедура длится 30 минут, один раз в неделю. Курс включает в себя 10 процедур.
2. Внимание: уменьшите энергию на 1-2 уровня во время процедур в зоне лба, скул и подбородка. (см таблицу)

Технология	Параметры
RF энергия	20J/ cm ³ -25J/ cm ³
Вакуум	1-2
Время пульсации	1s-2s
Мощность ИК лазера	4W-8W

3. Проведение процедуры:
 - А) очистите участок кожи клиента для процедуры
 - Б) Нанесите массажное масло
 - В) Последовательность процедуры по лицу: челюсть, лоб и верхняя губа
4. Для процедуры по лицу используйте манипулу 3 и следующие параметры:

Технология	Параметры
RF энергия	25J/cm ³ ~35J/cm ³
Вакуум	1-3
Время пульсации	1s-2s
Мощность ИК лазера	6W-10W

- 5) Движения манипулы:



Picture 1

Шаг 1: Подтяжка кожи:

- 1 Проводите процедуру по линиям, указанным на рисунке (Picture 1)
- 2 Придерживайте кожу рукой для лучшего натяжения
- 3 Повторяйте процедуру 2-3 раза

Шаг 2: Делайте дополнительные движения в таких местах как носогубная складка, морщины на лбу, морщины на лице

6) Эффект от процедуры

1. а) Нежная и румяная кожа лица
2. б) Уменьшение морщин на лице
3. с) Подтянутая кожа лица

Курс процедур в области глаз:

1. Эффективность: подтяжка кожи вокруг глаз (век), уменьшение морщин вокруг глаз (гусиные лапки), удаление мешков под глазами и удаление черных кругов вокруг глаз. Процедура производится один раз в неделю, один курс лечения включает десять процедур.
2. Проведение процедуры:
 - А) Очистите участок кожи клиента для процедуры
 - Б) Нанесите массажное масло
 - В) Установите нужные параметры и начните процедуру
3. Для процедуры в области глаз используйте манипулу 4 и следующие параметры:

Технология	Параметры
RF энергия	$20\text{J}/\text{cm}^3 \sim 25\text{J}/\text{cm}^3$
Вакуум	1
Время пульсации	1s-2s

4. 4) Выполняйте движения как показано на рисунке



Picture 2

5.

1 Проводите процедуру по линиям, указанным на рисунке (Picture 2)

2 Придерживайте кожу рукой для лучшего натяжения

3 Повторяйте процедуру 3-4 раза

6. Эффект от процедуры

- а) Может наблюдаться временное покраснение кожи
- б) Уменьшение морщин вокруг глаз

с) Лифтинг век

Курс процедур на шею:

1. Эффект: Подтяжка кожи, уменьшение объема, удаление морщин. Одна процедура в неделю, курс включает 10 процедур.
2. Проведение процедуры:
 - А) Очистите участок кожи клиента для процедуры
 - Б) Нанесите массажное масло
 - В) Установите нужные параметры и начните процедуру
3. Для процедуры по лицу используйте манипулу 3 и следующие параметры:

Технология	Параметры
RF энергия	$20\text{J}/\text{cm}^3 \sim 30\text{J}/\text{cm}^3$
Вакуум	1
Время пульсации	1s-2s
Мощность ИК лазера	6W-10W

- 4) Выполняйте движения как показано на рисунке

15



Picture 3

5. 1 Проводите процедуру по линиям, указанным на рисунке(Picture 3)
- 2 Придерживайте кожу рукой для лучшего натяжения
- 3 Повторяйте процедуру 2-3 раза
6. Эффект: Подтяжка кожи, уменьшение объема, удаление морщин.

Курс процедур по телу:

1. Эффект: Подтягивание (живот, спина, талия, бедра, икры, руки), контурирование тела, процедуры проводятся два раза в неделю и один курс лечения включает десять процедур.
2. Перед процедурой:
 1. Для того, чтобы клиенту лучше был виден эффект от процедуры, рекомендуем,


с согласия клиента, сделать фото До и После, в одинаковых условиях освещённости.
 2. За неделю до процедуры клиенту не рекомендуется принимать обезболивающие средства.
 3. Проведите как показано на рисунке (Picture 4) с нужными параметрами.

Мощность можно увеличить, если клиент чувствует себя комфортно.
3. Проведение процедуры:
 - А) очистите участок кожи клиента для процедуры
 - Б) Нанесите массажное масло
 - В) Установите нужные параметры и начните процедуру
4. Для процедуры по телу используйте манипулу 1 и следующие параметры:

Технология	Параметры
RF энергия	$40\text{J}/\text{cm}^3 \sim 60\text{J}/\text{cm}^3$
Вакуум	3-8
Время пульсации	2s-3s
Мощность ИК лазера	10W-20W
Частота вращения роликов	18-30rpm


Внимание: Уменьшайте уровень вакуума и РФ когда процедура идет по талии, животу и ребрам.

- 5) Принцип проведения процедуры:

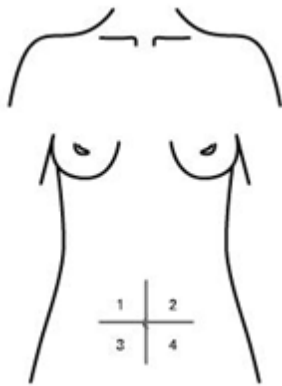


Picture 5

1. Разделите живот на четыре области, повторяйте процедуру на четырех областях, чтобы живот прогрелся.
2. Манипула должна плотно прилегать к коже. Убедитесь в этом, затем нажмите кнопку ENTER на манипуле, либо ножную педаль (опционально). Для паузы так же нажмите кнопку ENTER на манипуле.
3. Изменяйте стиль и уровни мощности в зависимости от состояния клиента.
4. Измеряйте объем талии выше на 3, 6 см и ниже на 3, 6 см пупка. Ведите учет замеров.
5. Направление движений показаны на рисунках ниже (Picture 6-7)

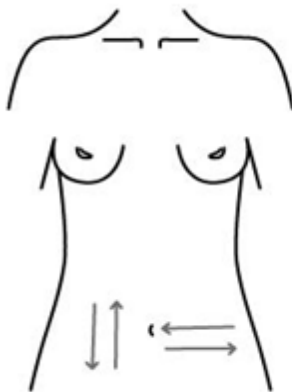

Picture 6

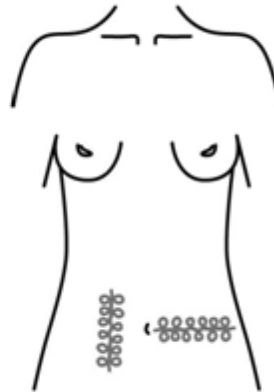


Picture 7

Курс процедур на спине


1. Проведение процедуры:
 - А) Очистите участок кожи клиента для процедуры
 - Б) Нанесите массажное масло
 - В) Установите нужные параметры и начните процедуру
2. Для процедуры по лицу используйте манипулу 1 и следующие параметры:

Технология	Параметры
RF энергия	40J/cm ³ ~60J/cm ³
Вакуум	4-8
Время пульсации	2s-3s
Мощность ИК лазера	10W-20W
Частота вращения роликов	18-30rpm

3) Направление движений показаны на рисунках ниже (Picture 8-9)

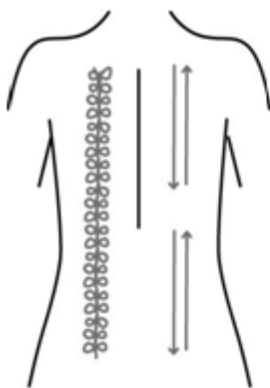

Picture 8

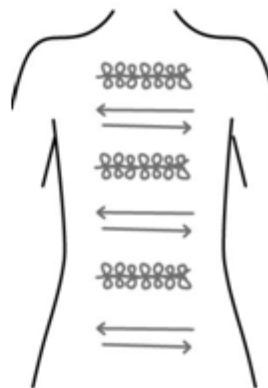

Picture 9

Курс процедур на ногах

1. 1) Проведение процедуры:
 - А) Очистите участок кожи клиента для процедуры
 - Б) Нанесите массажное масло
 - В) Установите нужные параметры и начните процедуру
2. 2) Для процедуры по лицу используйте манипулу 1 или 2 и следующие параметры:

Параметры для манипулы 1

Технология	Параметры
RF энергия	40J/cm ³ ~60J/cm ³
Вакуум	4-8
Время пульсации	2s-3s
Мощность ИК лазера	10W-20W
Частота вращения роликов	18-30rpm

Параметры для манипулы 2

Технология	Параметры
RF энергия	35J/cm ³ ~55J/cm ³
Вакуум	3-7
Время пульсации	2s-3s

Мощность ИК лазера	10W-20W
Частота вращения роликов	18-30rpm

3) Направление движений показаны на рисунках ниже (Picture 10-11)
 Сначала обработайте внешнюю поверхность бедра: сверху вниз (рисунок 10), слева направо; затем обработайте внутреннюю поверхность бедра.

Курс процедур по плечам:

1) Проведение процедуры:

- А) Очистите участок кожи клиента для процедуры
- Б) Нанесите массажное масло
- В) Установите нужные параметры и начните процедуру



Picture 10



Picture 11

Параметры для манипулы 2

Технология	Параметры
RF энергия	$35\text{J}/\text{cm}^3 \sim 55\text{J}/\text{cm}^3$
Вакуум	3-7
Время пульсации	2s-3s
Мощность ИК лазера	10W-20W
Частота вращения роликов	18-30rpm

Имейте ввиду, что подмышки – очень чувствительные области.

После процедур:

- 1) Не использовать холодную воду для мытья в течение 8 часов (исключая лицо)
- 2) Не производить массаж на обработанных областях
- 3) Избегать загара в первую неделю после процедуры
- 4) Разрешено использовать увлажняющие средства для кожи
- 5) Не есть жирную, острую, холодную пищу в течение 8 часов после процедуры