


---

Как позиционировать услуги в салоне без медицинской лицензии?

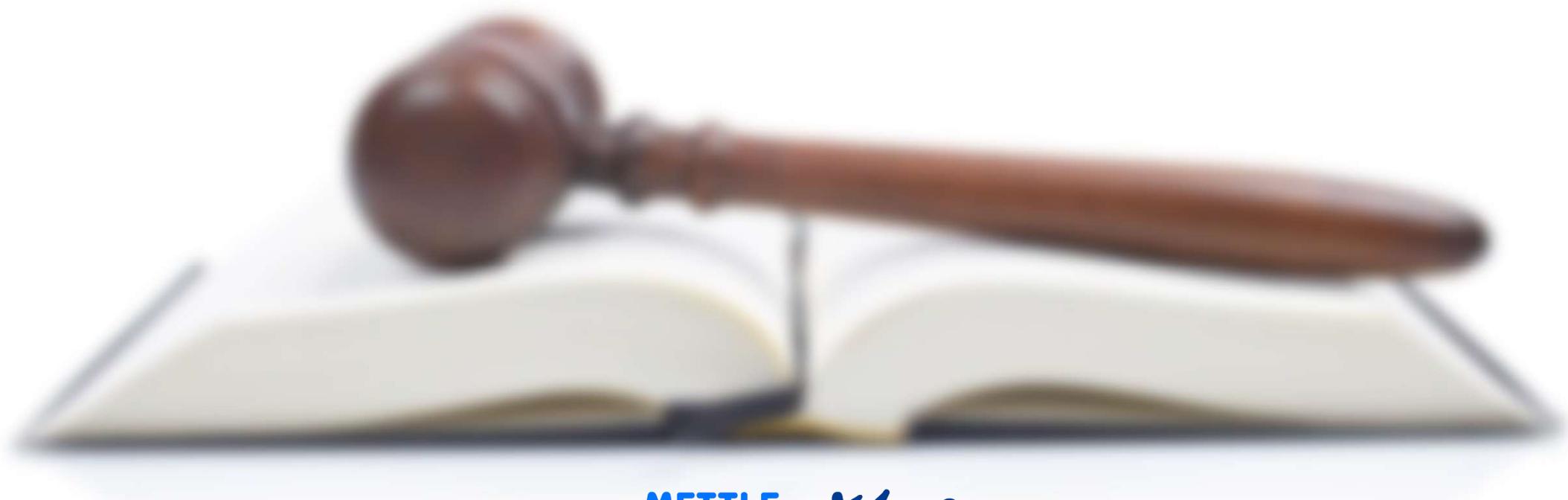

METTLE  
cosmetix®  
ORIGINAL

---

**На сегодняшний день нет четкой терминологии относящей  
большинство аппаратных методик к бытовым или медицинским  
услугам, по этому в зависимости от ситуации или желания  
заинтересованных лиц, одна и та же методика может  
рассматриваться как медицинская и как бытовая**



Для того, чтобы услуги не были расценены как медицинские необходимо сделать пометку в Вашем прайс листе / прейскуранте следующим образом:

•СПА уход по телу (косметический/эстетический массаж) на аппарате..... \*Услуга осуществляется на основании ОКПД 2 код 96.02.19.000 (Услуги косметические прочие) соответствует ОКУН 019324 (СПА уход по телу, включая эстетические методы с использованием косметических средств, природных и переформированных факторов воздействия), и на основании ГОСТ 55321-2012, ГОСТ 55317-2012). Является СПА-Услугой косметического характера и нацелена на улучшение физического и эстетического состояния здорового человека. Не является медицинской процедурой.

---

## К чему наши процедуры относятся?

«[ГОСТ 55321-2012](#). Услуги населению. СПА-услуги. Общие требования»,  
Национальный стандарт РФ, Утвержден Приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии 29.11.2012 №1605-ст;

«Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг», Профессиональный  
стандарт, Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  
22.12.2014 [№1069н](#);

**-3.1.2 Выполнение косметического массажа лица, шеи и зоны декольте**

**-3.2.2 Выполнение косметического массажа тела либо его отдельных частей**

---

Данные стандарты описывают перечень услуг, относимых к бытовым и не требующих наличия медицинской лицензии, в нашем случае:

- Косметический массаж: пластический, гигиенический, аппаратный, спа-массаж с применением косметических средств.

---

## Требования в помещении косметического кабинета

### Регламентируются тремя сводами правил:

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН) 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги», вступившие в силу 1 августа 2010 года.
2. Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», действующий с 1 мая 2009 года.
3. Строительные нормы и правила (СНиП) 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89\*), утвержденные приказом Минрегиона России от 1 сентября 2009 г. № 390 и начавшие действовать 1 января 2010 года.

---

## Требования в помещению косметического кабинета

- В косметических кабинетах допускается организация до 3 рабочих мест при условии их изоляции перегородками высотой 1.8–2.0 м.
- В жилых домах должна быть организована автономная вентиляция
- В подвальных помещениях лампы дневного света с усиленной светопередачей


Материалы (водостойкие краски, эмали, кафельные и глазурованные плитки, материалы с ламинированным покрытием и другие), используемые для отделки помещений, должны иметь документы, подтверждающие в установленном порядке безопасность используемой продукции. Поверхности стен, потолков и полов, наружная и внутренняя поверхность мебели должны быть гладкими, легко доступными для влажной уборки и устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами.

---

*Главное в работе с вашим клиентом – правильно услышать его желания, и хорошо донести суть вашей работы.*

*Любой курс процедур будет более эффективным, если дополнить его питьевым режимом.*

## Структура кожи

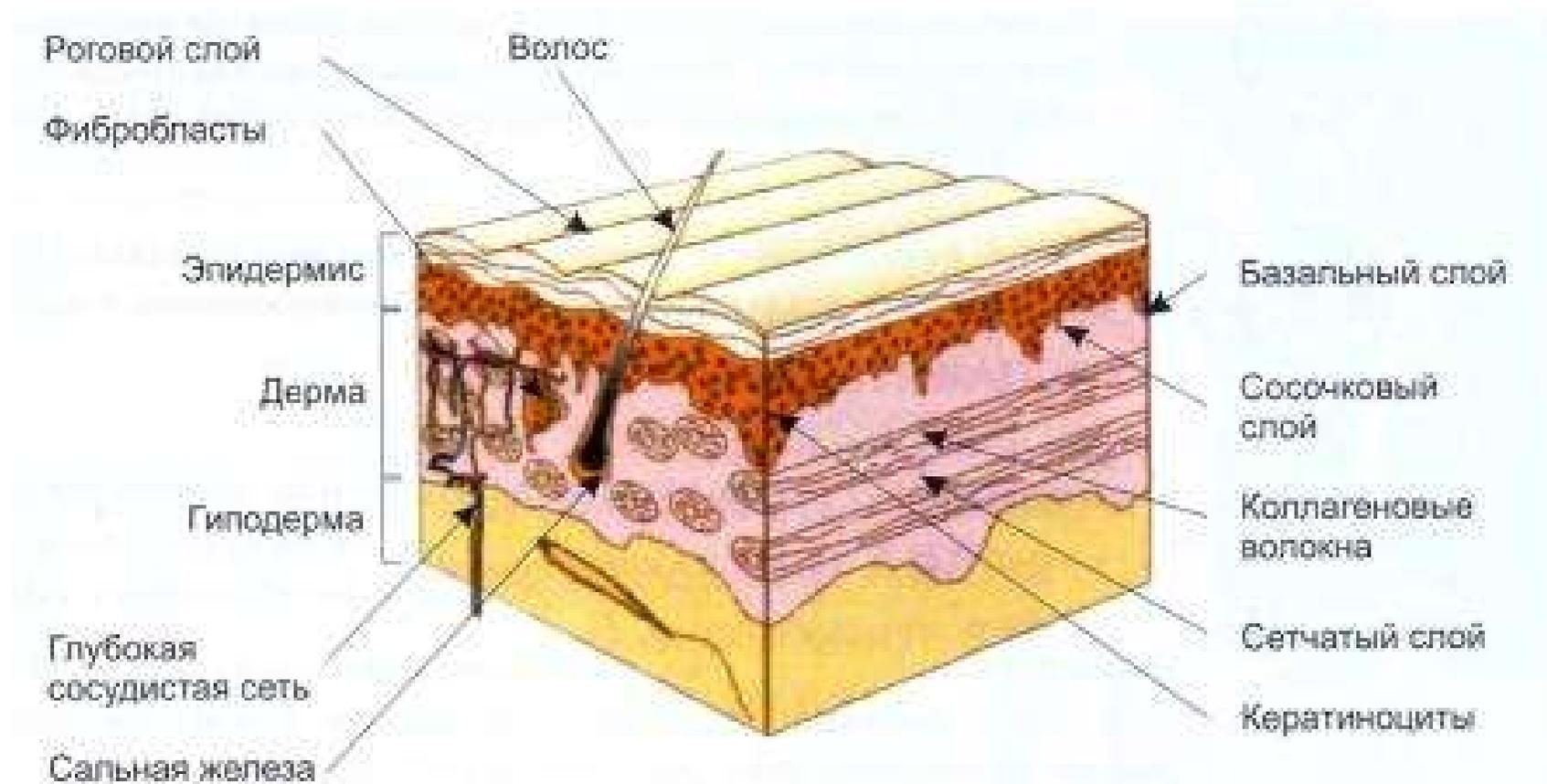


---

## Дерма


Придает коже прочность, обеспечивает питание и дыхание эпидермиса, принимая участие в выполнении всех функций кожи за счет находящихся в ней сосудов и нервов.

- **Сосочковый** (субэпидермальный) – рыхлая волокнистая соединительная ткань
  - **Сетчатый** (глубокий) плотная неоформленная волокнистая соединительная ткань (без резких границ переходит в гиподерму).
- Толщина дермы 4-8 мм



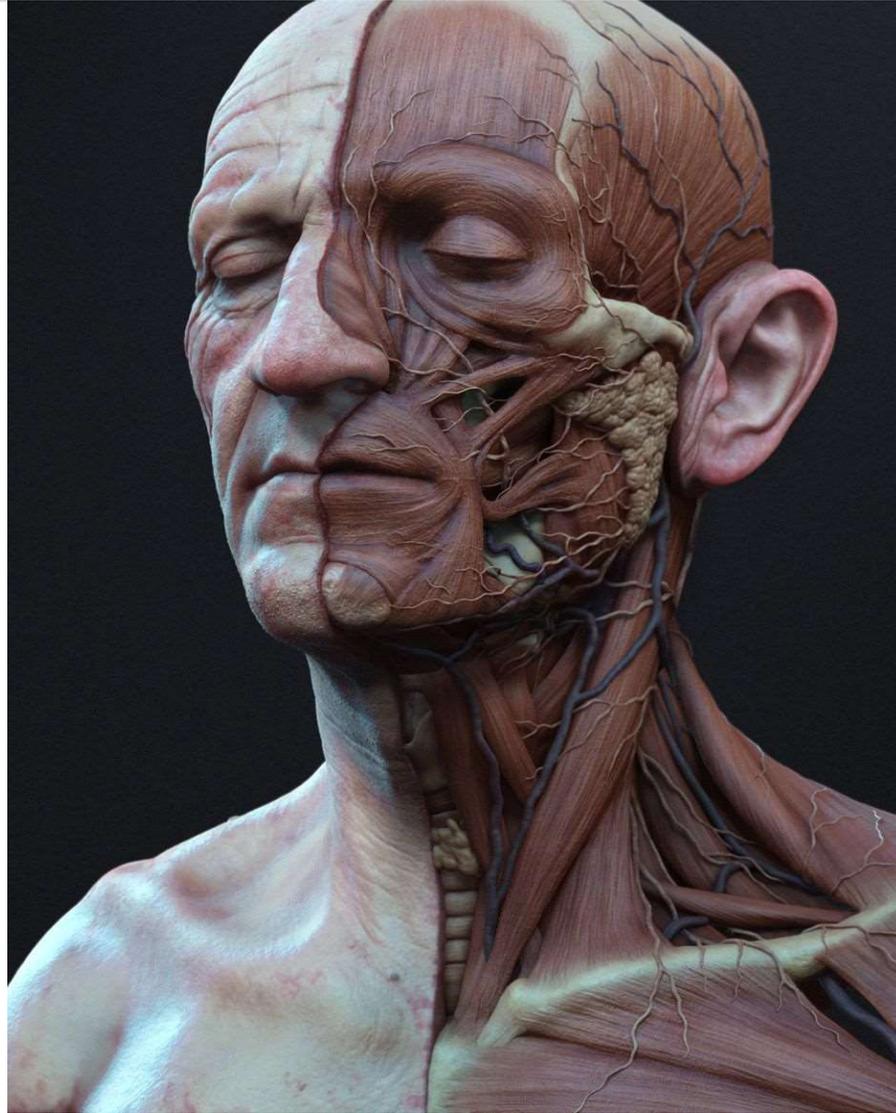


METTLE  
cosmetix®  
ORIGINAL

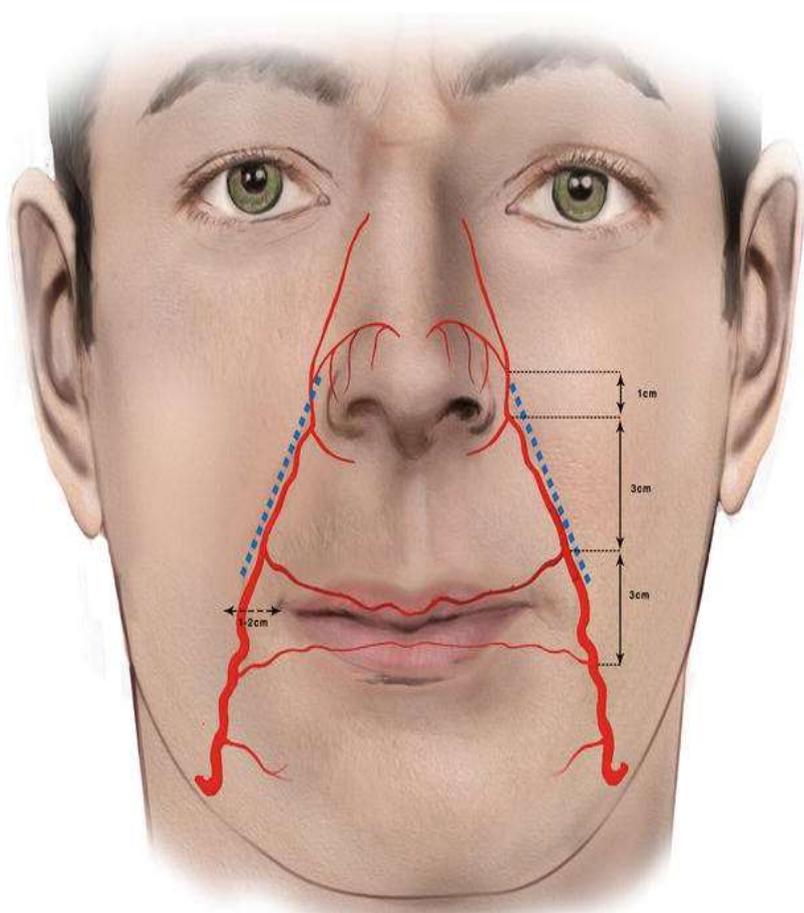

## Топография лицевой артерии

A. facialis (лицевая артерия) появляется на лице в месте пересечения нижней челюсти с передним краем жевательной мышцы. Сосуд лежит непосредственно на кости в слое глубокого жира, в этом месте над сосудом расположены только волокна m.platyza. Поднимаясь выше по направлению к крылу носа сосуд располагается в том же слое глубокого жира и проходит под mm.zygomatīci и леваторами верхней губы до крыла носа. В средней трети лица артерия залегает в проекции носощечной борозды и выше уровня крыла носа и располагается уже в мышечном слое (между m.orbicularis oculi латерально и m.levator labii superioris alaequae nasi медиально). В этом слое она доходит до внутреннего угла глаза – своей конечной точки, где анастомозирует с ветвями а. ophthalmica

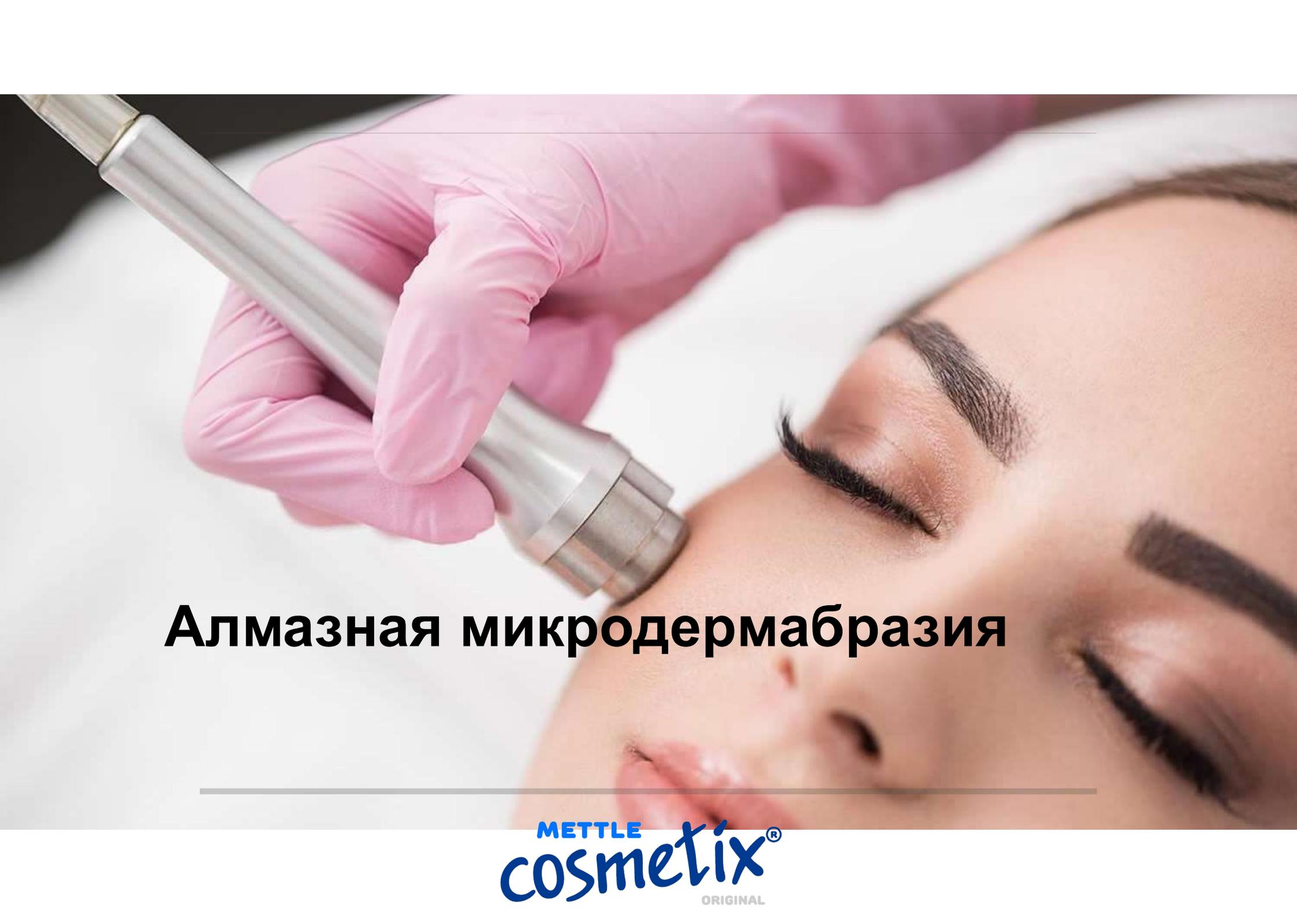


# Алмазная микродермабразия

---

**METTLE**  
**cosmetix**<sup>®</sup>  
ORIGINAL

---

**Алмазная микродермабразия** – это вид механического пилинга аппаратной косметологии проводимый с помощью вакуумного воздействия и специальных абразивных насадок

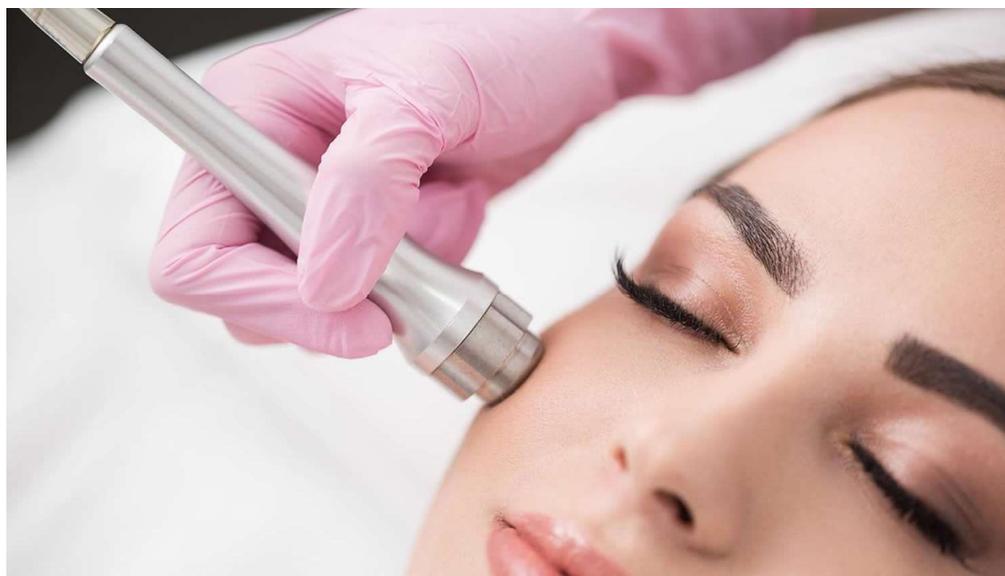

**METTLE**  
**cosmetix**<sup>®</sup>  
ORIGINAL

# Алмазная микродермабразия




METTLE  
cosmetix®  
ORIGINAL

На что мы воздействуем алмазной микродермабразией?



METTLE  
cosmetix®  
ORIGINAL


## СТРОЕНИЕ ЭПИДЕРМИСА

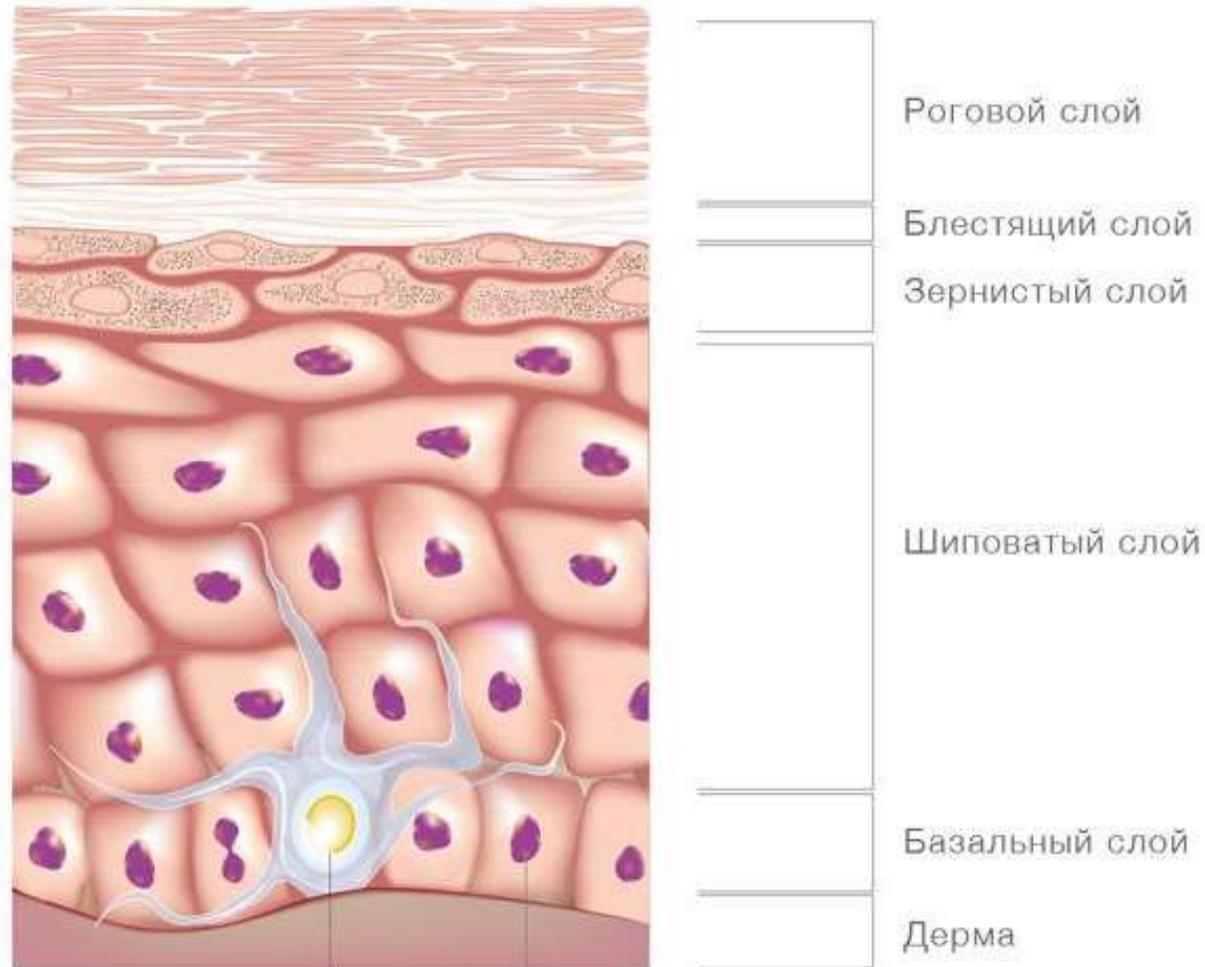

Меланоцит

Кератиноцит

**METTLE**  
**cosmetix**<sup>®</sup>  
ORIGINAL

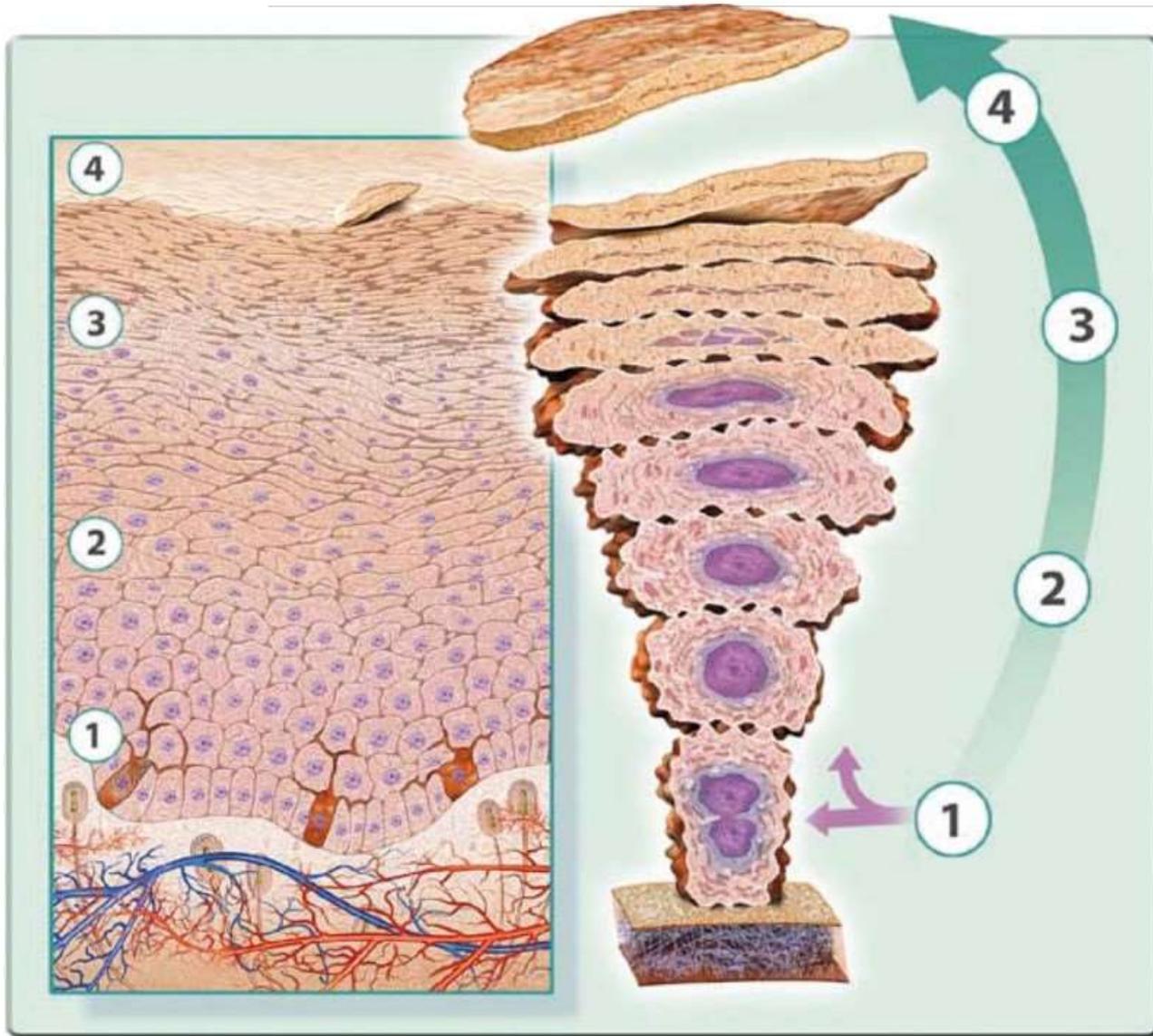

METTLE  
cosmetix®  
ORIGINAL


---

# Показания

- Сухая кожа;
- Расширенные поры, состояние постакне
- Наличие возрастных пигментных пятен (в том числе веснушек).
- Дряблая, увядающая кожа;
- Мелкие мимические морщины.


## Противопоказания

1. Тонкая кожа
2. Чувствительная кожа
3. Купероз
4. Воспалительные элементы
5. Истонченная кожа
6. Нарушение целостности

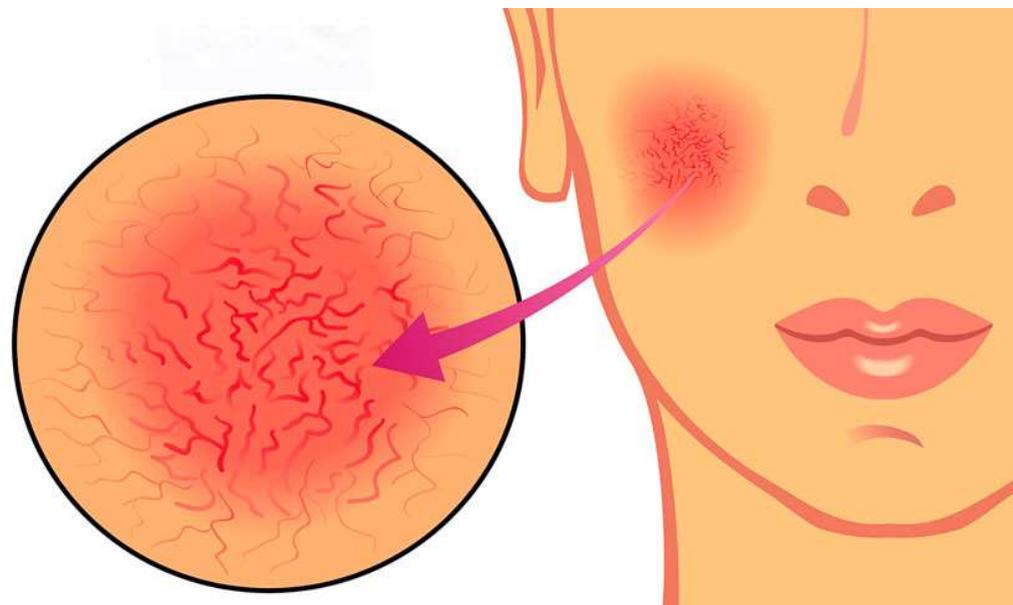

# Проведение процедуры

1. Заполнение индивидуальной карты клиента (информированное согласие, фотопротоколирование)
2. Очищение
3. Разогрев
4. Алмазная микродермабразия
5. Питание
6. Финиш-крем

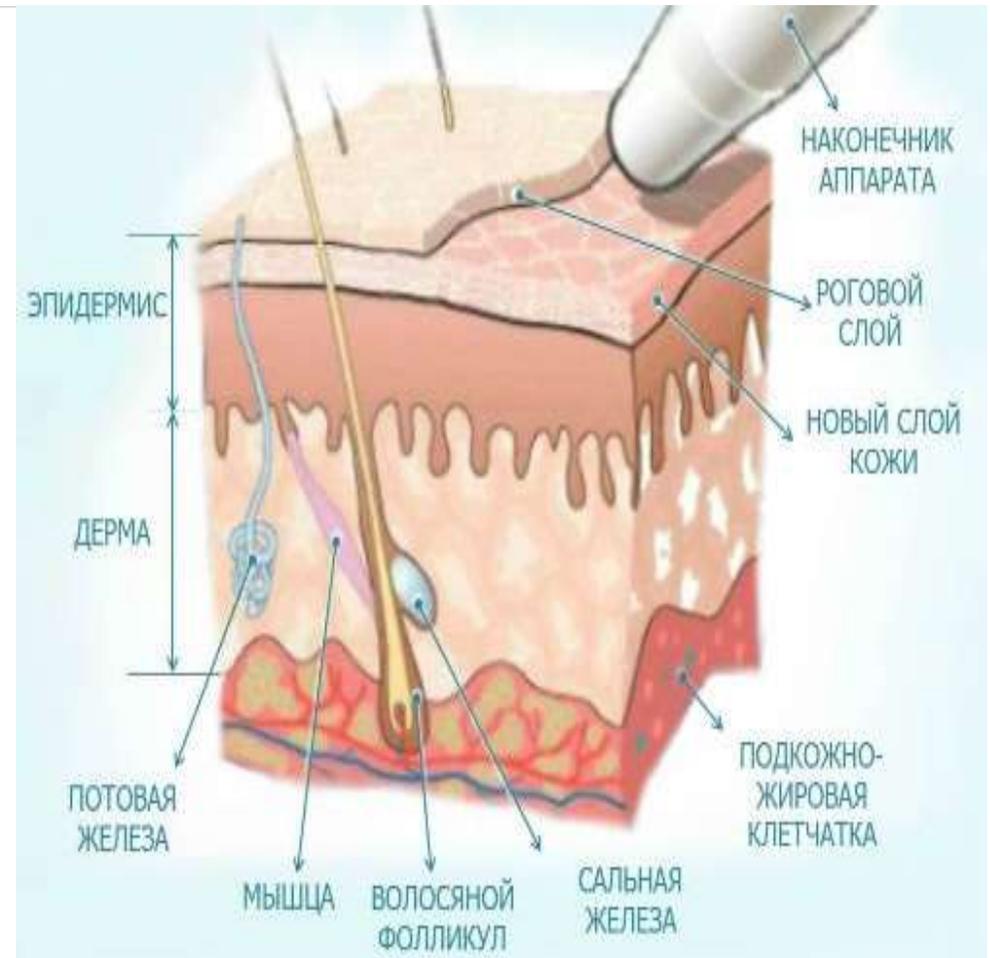


---

# Рекомендации после процедуры

1. Метео-покой (избегать инсоляции, сильного ветра)
2. Механический покой (не пользоваться скрабом, химическим, энзимным пилингом, отказаться от спиртосодержащей косметики)
3. Воздержаться от бани, сауны (7 дней)
4. Использование крема с SPF-защитой, полноценный домашний уход, за исключением эксfolлиации.

## Особенности при составлении курса процедур

1. Частота проведения не чаще 1 раза в неделю
2. В курсе 10 процедур (максимум)
3. Возможны поддерживающие процедуры (1 раз в 1-2 месяца)
4. Не рекомендуется проводить процедуру механического пилинга раньше, чем через 3-4 недели после:
  - Химических пилингов
  - Инвазивных методик (мезотерапевтические методы, контурная пластика)
  - Агрессивных воздействий (абляционные методы, лазерное и фотоомоложение)
  - Пластических операций

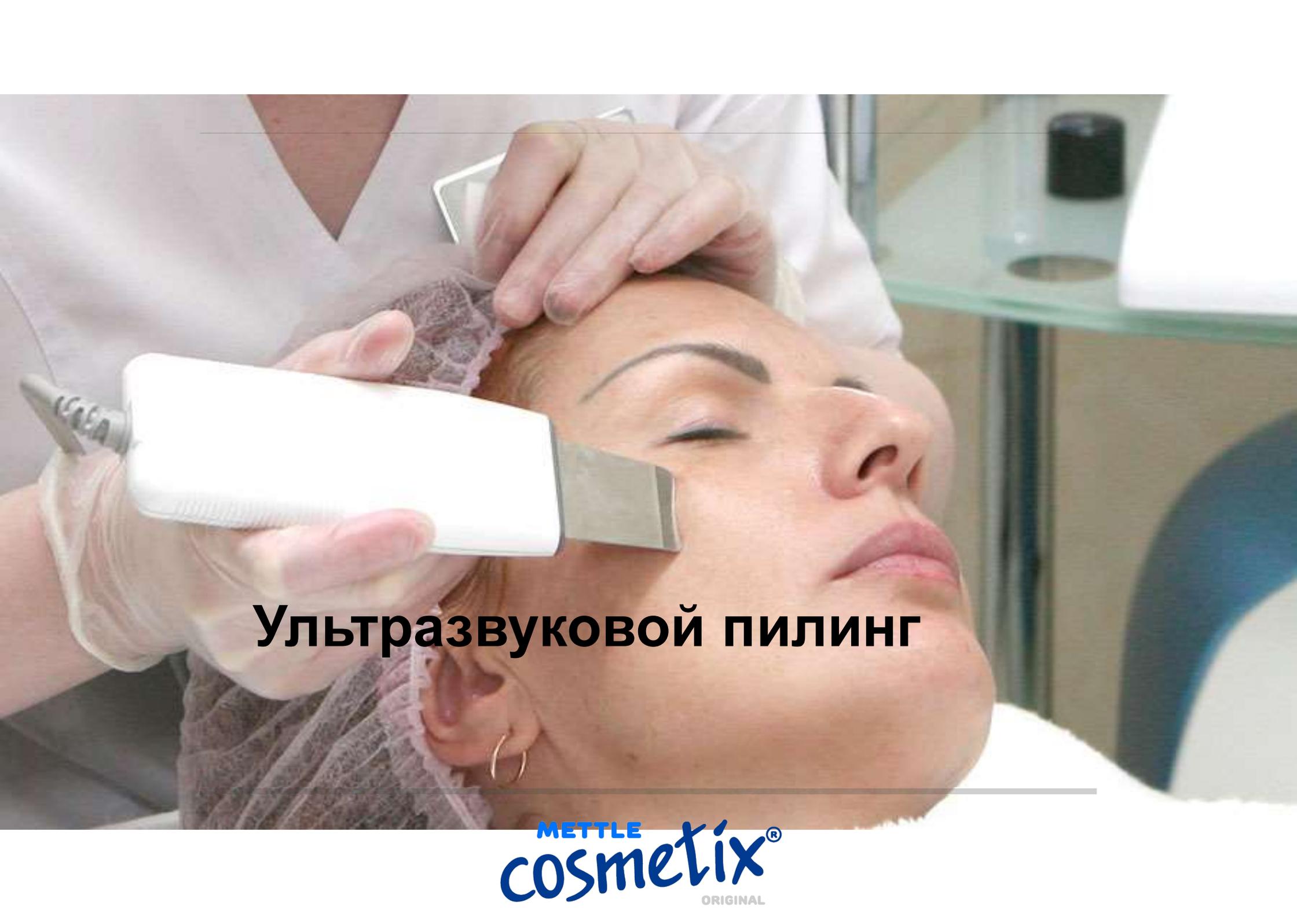A close-up photograph of a woman lying down, receiving a cosmetic treatment. A professional in a white lab coat and gloves is using a white handheld device with a metal applicator tip on the woman's cheek. The woman has her eyes closed and a neutral expression. The background shows a clinical setting with a glass table and a blue chair.

# Ультразвуковой пилинг


METTLE  
**cosmetix**<sup>®</sup>  
ORIGINAL

---

**УЗ пилинг**– это вид аппаратного пилинга, активным воздействием которого будет являться колебания ультразвуковой лопатки с частотой ультразвука 20-45 кГц



**METTLE**  
**cosmetix**<sup>®</sup>  
ORIGINAL

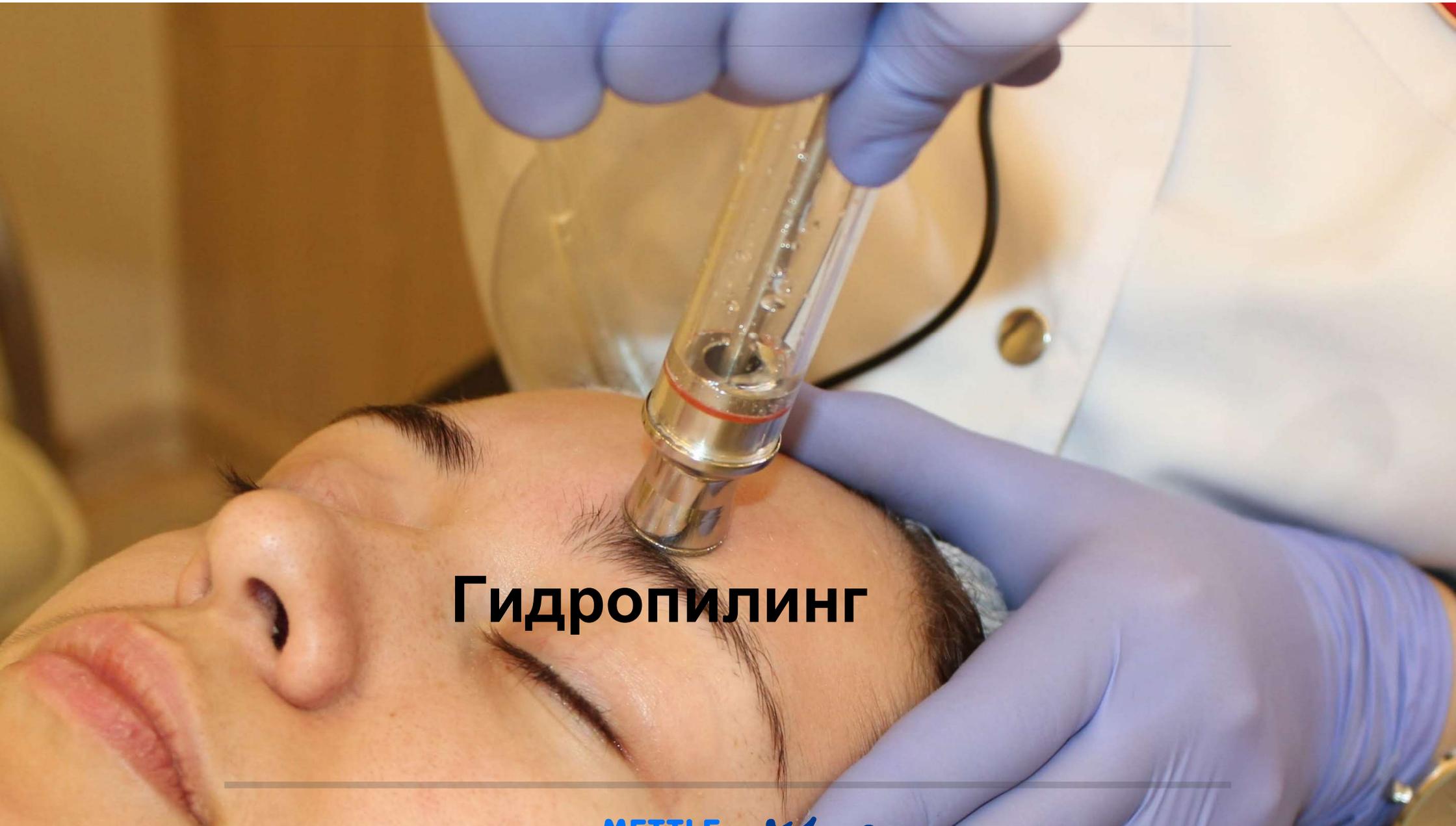

# Гидропилинг


METTLE  
**cosmetix**<sup>®</sup>  
ORIGINAL

---

**Гидропилинг**– это вид аппаратного пилинга, с использованием отрицательного давления, жидкости(сывороток) и специальных абразивных насадок



**METTLE**  
**cosmetix**<sup>®</sup>  
ORIGINAL

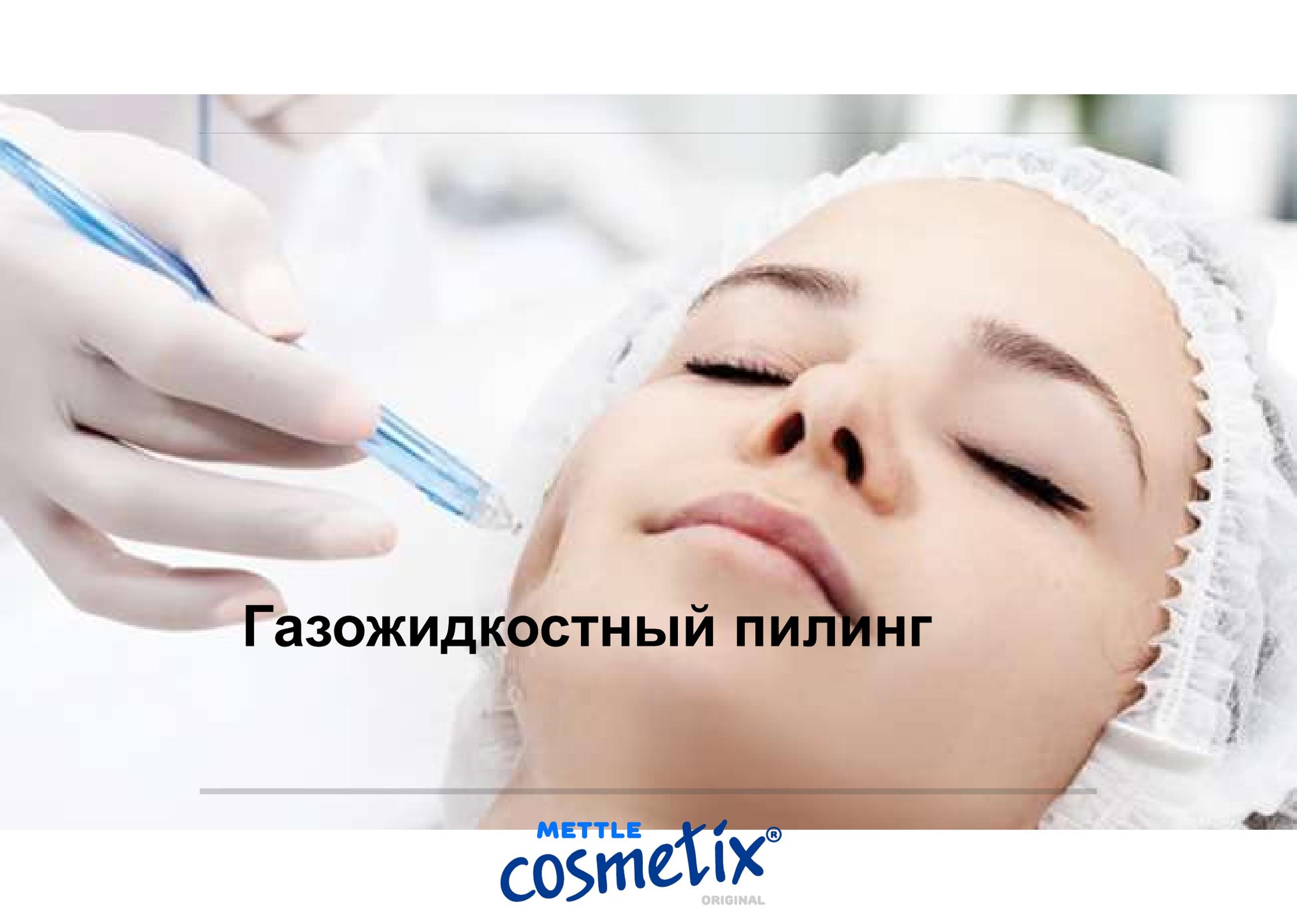

# Газожидкостный пилинг

---

**METTLE**  
**cosmetix**<sup>®</sup>  
ORIGINAL

---

**Газожидкостный пилинг**– это вид аппаратного пилинга, с использованием газожидкостной струи высокого давления 4-7 bar и скоростью потока свыше 200 м/с.

Имеет массу эффектов, таких как микромассаж, омоложения, снятие отечности. Используется как для лица так и для тела.



**METTLE**  
**cosmetix**<sup>®</sup>  
ORIGINAL

---

## Показания

1. Толстая пористая кожа
2. Состояние постакне

---

## Противопоказания

1. Тонкая кожа
2. Чувствительная кожа
3. Купероз
4. Воспалительные элементы
5. Истонченная кожа

---

## Особенности при составлении курса процедур

1. Частота проведения 1 раз в неделю
2. В курсе 10 процедур
3. Не рекомендуется проводить процедуру механического пилинга раньше, чем через 3-4 недели после:
  - Химических пилингов
  - Инвазивных методик (мезотерапевтические методы, контурная пластика)
  - Агрессивных воздействий (абляционные методы, лазерное и фотоомоложение)
  - Пластических операциях

# Подготовка к процедуре

- Информированное согласие
- Индивидуальная карта клиента
- Протоколирование (замеры, фото до и после, график посещений с пометками о реакциях, и подписью клиентов)



# Виды воздействия

---


Воздействие насадками может быть двух видов:

Динамические и статические.

Направление диктуется расположением мышц.

В зависимости от этого каждую мышцу вы воздействуете поперечно фиксируя по 4-6 секунд, а затем медленными динамическими движениями по 7-9 секунд. Повторяя по три раза

## Массажные линии

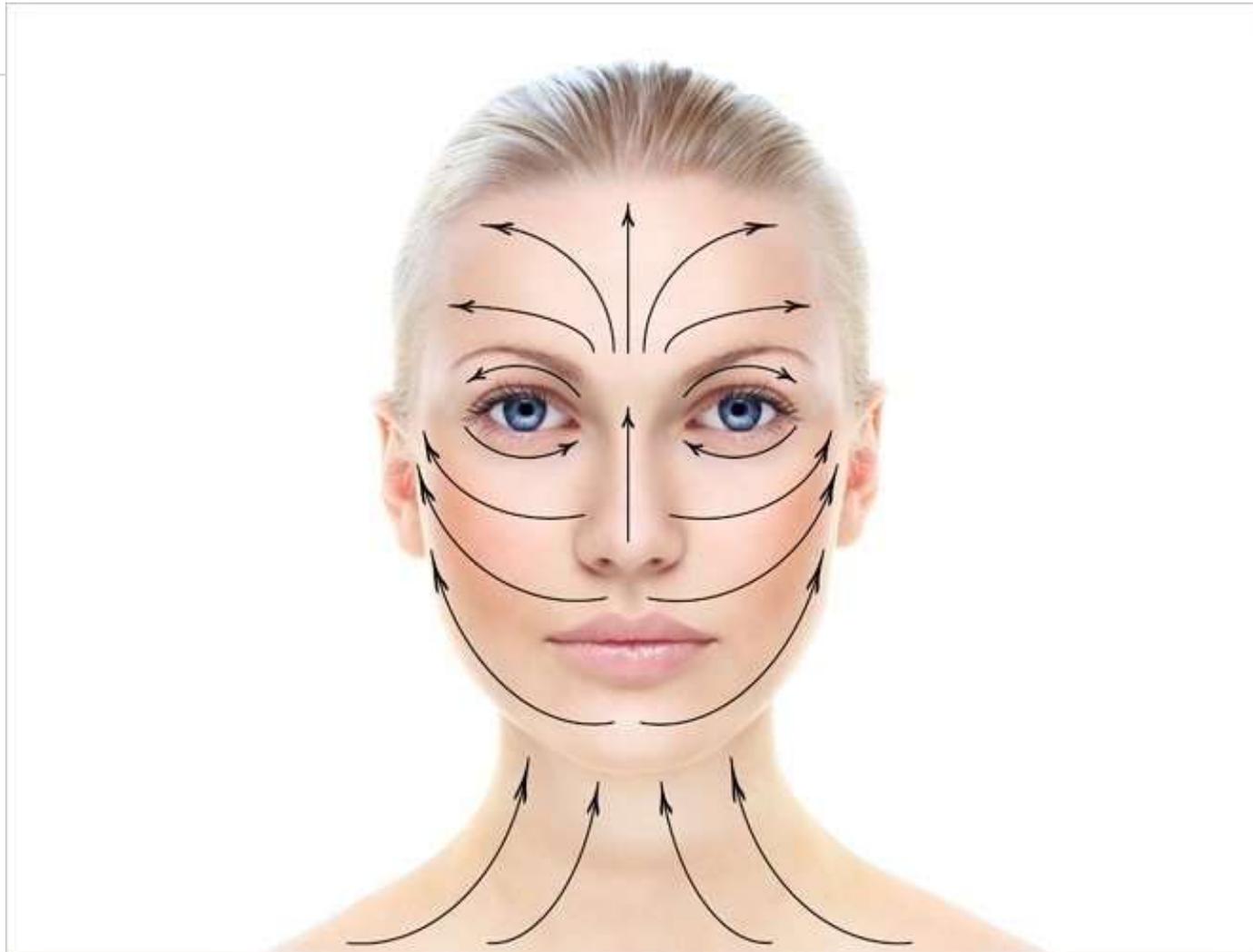

METTLE  
**cosmetix**<sup>®</sup>  
ORIGINAL

---

*Главное в работе с вашим клиентом – правильно услышать его желания, и хорошо донести суть вашей работы.*

*Правильно подобранный домашний уход – 80% успеха на пути к красивой коже*

**METTLE**  
**cosmetix**<sup>®</sup>  
ORIGINAL

---

**Благодарим за внимание!**

**METTLE**  
**cosmetix**<sup>®</sup>  
ORIGINAL