

Обучающие материалы для
Аппарата SECRE фракционного
игольчатого РФ лифтинга с вакуумом и
золотым напылением игл КС 20+



Оглавление

Введение	3
Обзор аппарата	4
Манипула устройства и насадки на манипулу	4
Интерфейс устройства	4
Интерфейс по телу	5
Таблица параметров работы по разным частям лица и тела:.....	6
Проведение процедуры:	6

Введение

Фракционный игольчатый радиоволновой лифтинг Secret RF

Фракционный игольчатый лифтинг Secret RF – косметологическая процедура, благодаря которой можно добиться выразительного омоложения и подтяжки кожи. Выполняется она с использованием радиоволновой энергии, которая воздействует на глубокие слои дермы, нагревая ее структурные элементы. Прогревание дермальных слоев стимулирует кровообращение, усиливает синтез коллагеновых и эластиновых волокон, за счет чего происходит восстановление ее структуры. В результате уже за несколько сеансов можно добиться видимого лифтингового эффекта.

Проводится лифтинг Secret RF с использованием золотых микронных игл, которые проникают в кожу, что обеспечивает глубокое воздействие без травматизации. Процедура имеет накопительный эффект – уже спустя 4-8 недель можно заметить выраженное разглаживание морщин, сужение расширенных пор, повышение эластичности и тонуса кожи. Преимущество процедуры в ее безопасности, коротком реабилитационном периоде, и универсальности (она подходит для всех типов кожи, а загар не является противопоказанием).

Лифтинг RF – ответы на вопросы

Вызывает ли процедура Secret RF лифтинга болевые ощущения?

Во время сеанса пациенты не ощущают боли, только легкое пощипывание и тепло в зоне воздействия. Перед процедурой наносится обезболивающий состав.

На каких частях тела можно проводить радиоволновой Secret RF лифтинг?

Лицо, учитывая кожу вокруг глаз, руки, шея, зона декольте, бедра и ягодицы.

Сколько необходимо сеансов Secret RF лифтинга для достижения результата?

Курс радиоволновой терапии состоит из 3-4 процедур с интервалом в 1-2 месяца.

Сколько длится реабилитационный период после Secret RF лифтинга?

После процедуры может появиться отечность и покраснения, которые исчезают достаточно быстро. Для полного восстановления кожи требуется 2-3 дня.

Обзор аппарата




Манипула устройства и насадки на манипулу



Иглы делятся по размерам на
64 иглы / 25 игл / 10 игл / nano размер




Интерфейс устройства

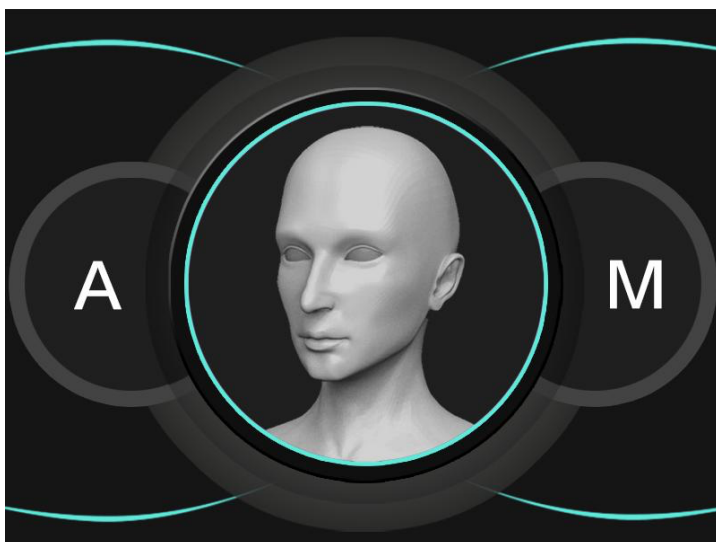

На рисунке показан интерфейс работы по лицу

A – Авто-режим

M – Режим ручной настройки

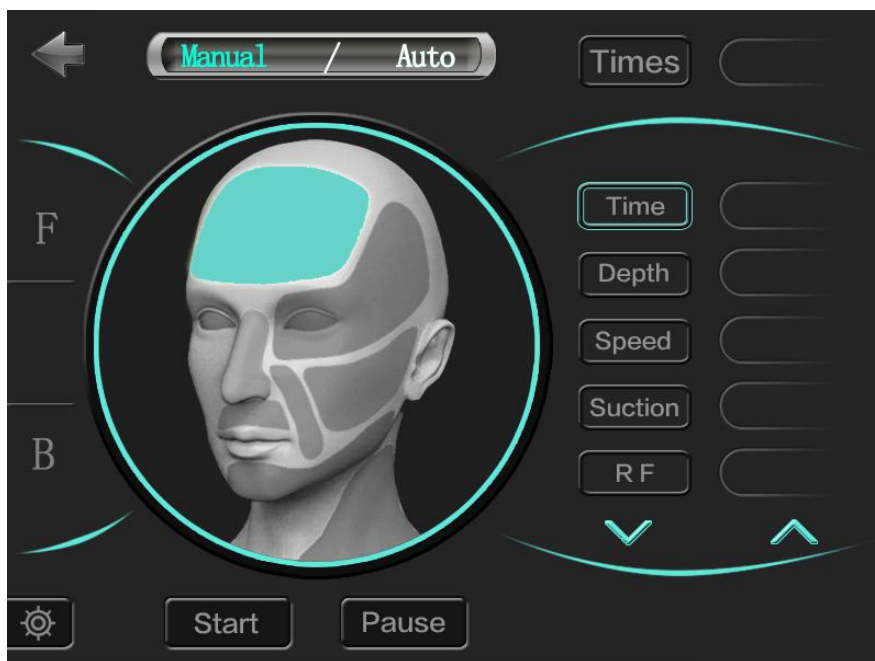

В данном меню можно изменять параметры и время процедуры.

Интерфейс по телу

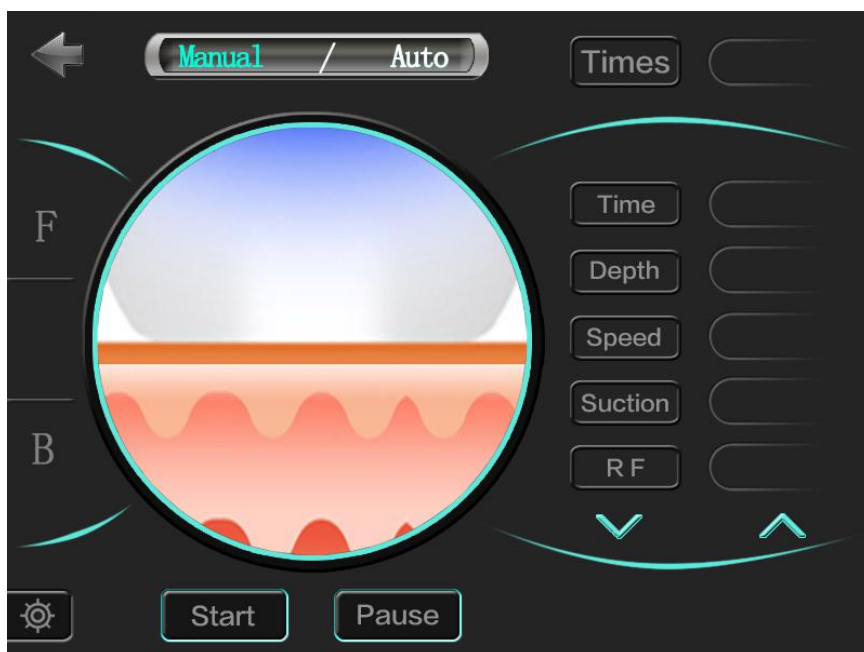


Таблица параметров работы по разным частям лица и тела:

Место процедуры	Глубина (depth)	Скорость (speed)	Всасывание (suction)	RF мощность
Лоб	0.5-1.0mm	0.2-0.3	1-2	60-110W
Лицо	1.0-1.5mm	0.2-0.3	1-2	60-100W
Область глаз	0.5-1.0mm	0.2-0.3	1-2	60-100W
Подбородок	0.5-1.2mm	0.2-0.3	1-2	60-100W
Нос	0.5-1.0mm	0.2-0.3	1-2	60-100W
Шея	1.0-1.5mm	0.2-0.3	1-2	60-100W
Оспины	1.0-2.0mm	0.2-0.3	1-2	60-100W
Шрамы	1.0-2.0mm	0.2-0.3	1-2	60-120W
Живот	1.0-3.0mm	0.2-0.3	0-1	60-120W

Проведение процедуры:

- 1) Перед процедурой кожа очищается специальным антисептиком.
- 2) Перед процедурой наносится обезболивающий крем локального действия, для того чтобы процедура была безболезненной и комфортной.
- 3) Если у Клиента высокий болевой порог — процедуру можно проводить и без анестезии.
- 4) В процессе процедуры микроиглы плавно прокалывают кожу. Обрабатывается полностью зона процедуры.
- 5) После фракционного воздействия на обработанном участке кожи возникнут небольшой отёк и покраснение, которые пройдут в течение 1-2 дней. Необходимо использовать специальные крема, улучшающие регенерацию, и спф-защиту. Не мыть кожу в течение 24 часов после процедуры.

- 6) Для получения максимального эффекта рекомендуется курс из 3-4 процедур с интервалом 1-2 мес.