

Аппарат для миостимуляции В-333



Инструкция по эксплуатации


Оглавление

ОПИСАНИЕ	3
ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА	3
ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА:	4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:	4
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ:	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	5
ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР:	6

Описание

Принцип действия миостимулятора В-333 основан на эффекте искусственного возбуждения мышцы с помощью электрического сигнала, генерируемого миостимулятором и передающегося на мышцы, он проходит по тканям и вызывает двигательную активность в мышце. При этом повышается приток крови к сократившейся мышце, активизируется синтез белков, стимулируется отток венозной крови и лимфоотток. Аппарат миостимуляции В-333 имеет 10 каналов и 4 основные программы.

Внешний вид устройства

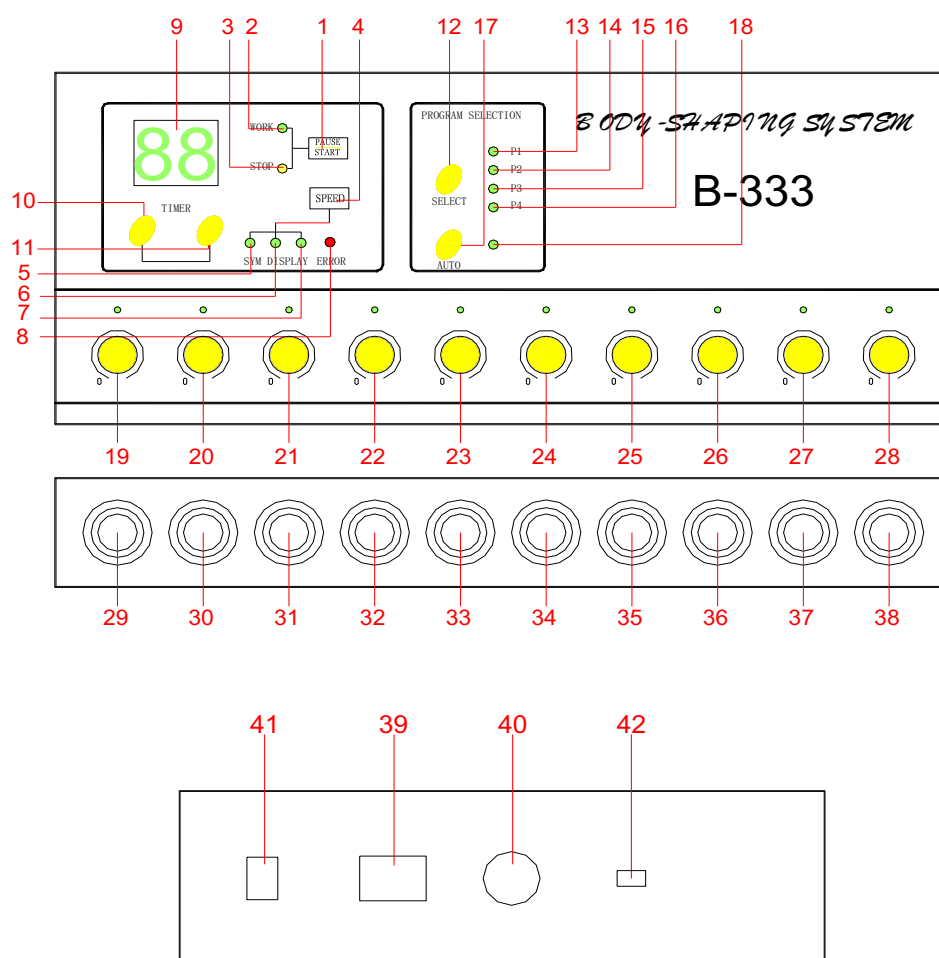

Описание внешнего вида:

1: Кнопка Старт/Пауза	2,3: Индикатор работы
4: Скорость	5,6,7: Индикатор скорости
8: Индикатор ошибки	9: Экран Время
10,11: Время + / -	12: Выбор программы
13-16: Номер программы (P1; P2; P3; P4)	17: Выбор режима Авто
18: Режим Авто	19-28: Регулировка мощности
29-38: Разъемы для электродов	39: Разъем кабеля питания 220V
40: Предохранитель	41: Включение/Выключение
42: 220/110V Установка напряжения	

Инструкция по применению:

1. ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ аппарата убедитесь что напряжение установлено на 220V (Задняя часть устройства, 42 на рисунке). Подключите кабели к электродам и к устройству. Можно подключать нужное количество электродов и компоновать их по размерам (2 больших, либо 2 маленьких, либо 1 большой и 1 маленький)
2. Подключите кабель питания, включите устройство. Таймер загорится, время по умолчанию 30 минут.
3. Установите время на нужное значение (Не рекомендуется проводить процедуру более чем 30 минут на одной зоне). Если при включении аппарат выдаст ошибку Error и зазвенит зумер – отключите все электроды с помощью регулировок (19-28 на рисунке).
4. Установите одну из четырех программ, либо режим Авто (Программы будут меняться автоматически через определенный промежуток времени).
5. Отрегулируйте скорость и мощность подачи тока.
6. Равномерно нанесите гель на электроды, приложите их к нужной зоне и закрепите биндажем. (Так же в комплекте есть пара самоклеящихся электродов для лица, либо шейноворотниковой зоны, и 2 больших накладок для зоны груди или ягодиц) Установите пары электродов на одну зону, они должны быть расположены не дальше 5 см друг от друга.
Никогда не используйте аппарат в зоне сердца!
7. Нажмите кнопку Старт для начала процедуры.
8. Регулируйте мощность тока с помощью рукояток 19-28. Мощность должна быть примерно одинаковой на всех зонах, чтобы у клиента не возникало дискомфорта.
9. После процедуры выключите аппарат, очистите электроды.

Описание программ:

P1 – программа для посттравматического восстановления мускулатуры, снятия болевых симптомов, расслабление

P2 – реабилитация для спортсменов, желающих вернуть мышцам тонус, массу и эластичность

P3 – программа лимфодренажа, интенсификация обменных процессов, тургор и подтяжка кожи

P4 – работа с избыточным весом, выведением шлаков и коррекцией фигуры. Активное жиросжигание и глубокий массаж.

Внимание: При выборе определенной процедуры аппарат сам подберет наиболее подходящую скорость.

Не рекомендуется использовать беременным женщинам, людям с металлическими имплантами, людям с заболеваниями, протекающими с воспалительным процессом


Технические характеристики:

- Сила тока max – 75 мА
- Частота импульса – 1/3/10 Гц
- Частота подымпульса – 100 Гц.
- Питание: 220 В и 50 Гц
- Мощность: 12 W
- Вес - 7,2 кг
- Габариты: 47 см x 39 см x 22 см.
- Гарантия – 1 год.


Протоколы процедур:

Время и интенсивность процедуры определяется оператором в зависимости от нужного эффекта и цели процедуры.


Цифры на рисунке обозначают расположение электродов по номеру подключения к аппарату.

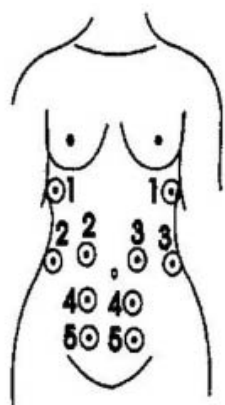

Расположение электродов
в зоне живота

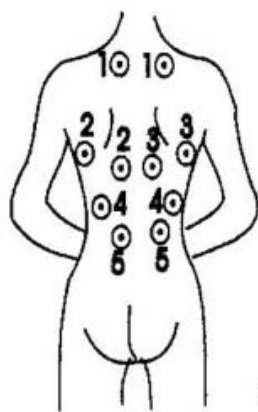


Расположение электродов
на спине

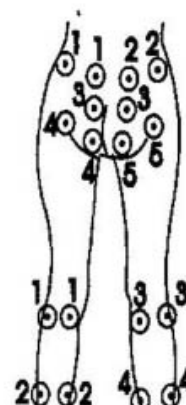


Расположение электродов
на ягодицах и задней
поверхности голени



Расположение электродов
на руках

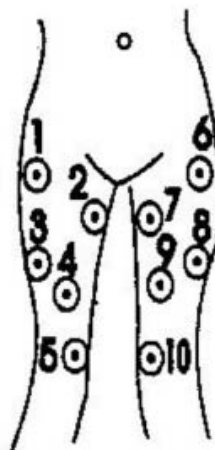

Расположение электродов
на бедрах спереди

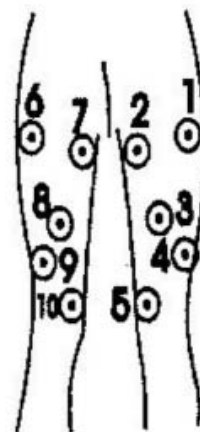

Расположение электродов
на бедрах сзади