

Аппарат высокосфокусированного ультразвука
(HIFU+RF) VELASHAPE технология Ultrashape V10,
версия V5 PRO (GK-308)



Обучающие материалы

Оглавление

Введение	3
Внешний вид аппарата	4
Интерфейс аппарата.....	4
Процедура на манипуле А	4
Процедура на манипуле В.....	5
Процедура на манипуле Velashape.....	6
Порядок движения манипул	6
Область живота.....	6
Ноги	7
Руки	7
Спина.....	7
Ягодицы	8
Поясница.....	8
Противопоказания:	9
Рекомендации.....	9

Введение

Аппарат высокосфокусированного ультразвука, RF и UltrashapeV10 V5PRO (GK-308) совмещает в себе функции высокосфокусированного ультразвукового воздействия с радиочастотным излучением. Эти функции эффективно помогают избавиться от жировых отложений на сложных участках, таких как: галифе, «ушки» на боках, отложения на бедрах и других участках. Процедуры имеют долгосрочный эффект и позволяют добиться коррекции фигуры за 4 недели.

Аппарат включает в себя 3 манипулы:

1 и 2 манипулы совмещают в себе HIFU и RF излучения, уровень которого можно менять во время процедуры, отличаются по размерам и подходят для разных областей тела.

Третья манипула действует по технологии Ultrashape


UltraShape – это нехирургическая процедура, которая использует целевую ультразвуковую технологию. чтобы удалить жировые клетки в области брюшной полости, но это не решение потери веса. Технология включает в себя воздействие 40к кавитации, RF излучения, биотоки.

Идеальные кандидаты должны иметь возможность зажать хотя бы один дюйм жира в своей средней части и иметь индекс массы тела (ИМТ) 30 или менее.

Внешний вид аппарата



Интерфейс аппарата

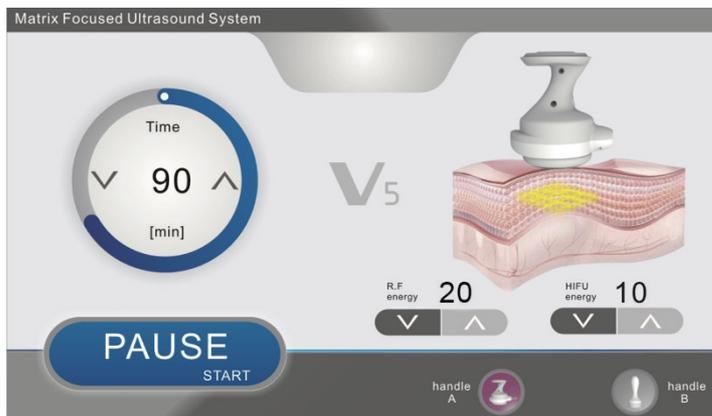

Процедура на манипуле А

- 1) Очистите область процедуры перед началом 
- 2) Подключите манипулы и включите аппарат, нажав на кнопку включения 
- 3) Нажмите клавише Enter на дисплее 

- 4) Выберите манипулу А для выбора большей из двух дополнительных манипул, для начала установите на небольшой уровень энергии (20), увеличивайте его исходя из биологического отклика клиента. Клиент может почувствовать тепло и жжение



- 5) Установите время процедуры , рекомендуемое время процедуры 30-40 мин., зависит от площади участка тела.


- 6) После установки параметров нажмите клавишу , и затем запустите



процедуру с помощью круглой кнопки на манипуле.

- 7) Процедура проводится по небольшому количеству геля.

Процедура на манипуле В

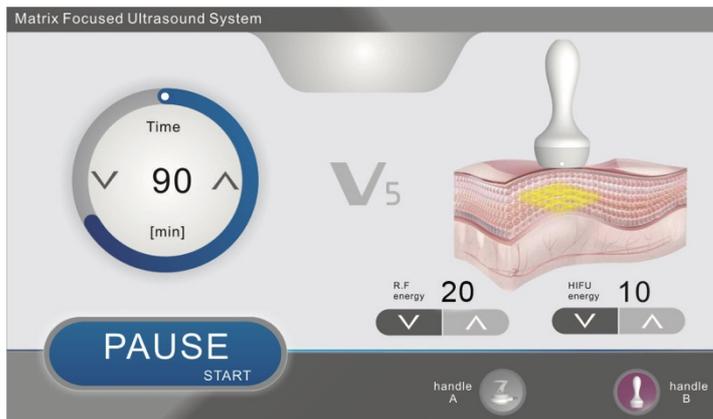

- 1) Очистите область процедуры перед началом 

- 2) Подключите манипулы и включите аппарат, нажав на кнопку включения 

- 3) Нажмите клавише Enter на дисплее 

- 4) Выберите манипулу В для выбора меньшей из двух дополнительных манипул



, для начала установите на небольшой уровень энергии RF (20),


увеличивайте его исходя из биологического отклика клиента . Клиент может почувствовать тепло и жжение. В настройках можно выставить уровень энергии HIFU от 0 до 10, так же начинайте с меньших значений.



- 5) Установите время процедуры , рекомендуемое время процедуры 30-40 мин., зависит от площади участка тела.

- 6) После установки параметров нажмите клавишу , и затем запустите процедуру с помощью круглой кнопки на манипуле. 
- 7) Процедура проводится по небольшому количеству геля.

Процедура на манипуле Velashape

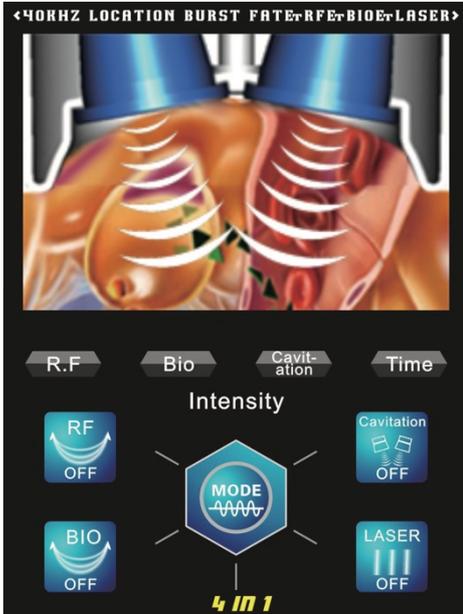

- 1) Установите время процедуры , рекомендуемое время процедуры 45-60 мин., зависит от площади участка тела.
- 2) Процедура проводится по небольшому количеству геля.
- 3) Настройте энергию и функции манипулы (RF 1-10, BIO токи 1-15, 40К кавитация 1-10). Для начала установите на небольшой уровень энергии RF (20), увеличивайте его исходя из биологического отклика клиента. Клиент может почувствовать тепло и жжение.
- 4) После проведения процедуры нанесите увлажняющий гель и очистите манипулу.

Порядок движения манипул

Примерно обозначьте для себя линии на теле клиента, по которым пройдет процедура, как показано на рисунках ниже

Область живота



Начинайте движение от верхней боковой части живота к центру. Затем повторяйте движение ниже и ниже. Не передвигайте манипулы слишком быстро, но и не стойте на одном месте.

Ноги



Перемещайте манипулу снизу вверх круговыми движениями, как показано на рисунке.

Руки



Перемещайте манипулу снизу вверх круговыми движениями, как показано на рисунке.

Спина



Манипула управляется от нижней части шейного отдела позвоночника до задней части талии, перемещаясь вперед и назад по всей спине.

Ягодицы



Движение снизу вверх

Поясница



Движения от центра к бокам

Противопоказания:

- 1) беременность и лактация,
- 2) период менструации,
- 3) фотосенсибилизация,
- 4) наличие солнечных ожогов и открытых ран,
- 5) онкологические заболевания,
- 6) патология сердца,
- 7) сахарный диабет,
- 8) наличие в организме пациентов металлических предметов или кардиостимулятора.

Рекомендации

- 1) Не принимать душ в течение 4 часов после процедуры
- 2) Пить около 2 литров в день
- 3) Занятия спортом не менее получаса в день
- 4) Не переедать
- 5) Сохранять режим питания и дня.