

Аппарат Vela Shape V10


Инструкция по применению



Оглавление

АППАРАТ VELA SHAPE V10	1
ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА (ВВЕДЕНИЕ):	3
Манипула 1 вакуумного массажа + RF по телу	4
Дисплей манипулы 2(см. рисунок) – управление одинаково с манипулой 1	4
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ АППАРАТА V10	5
Условия работы и технические параметры:	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:	6
БЕЗОПАСНОСТЬ	7
Начало работы Установка манипул	7
Настройка параметров на дисплее	8
Технические характеристики манипул и базовые настройки	9
Управление устройством	10
ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР:	11
Принцип воздействия:	11
Курсы процедур (для справки):	12
Подготовка к процедуре:	12
Курс процедур по лицу:	13
Курс процедур в области глаз:	14
Курс процедур на шею:	15
Курс процедур по телу:	16
Курс процедур на спине	18
Курс процедур на ногах	18
Курс процедур по плечам:	19

Внешний вид устройства (введение):

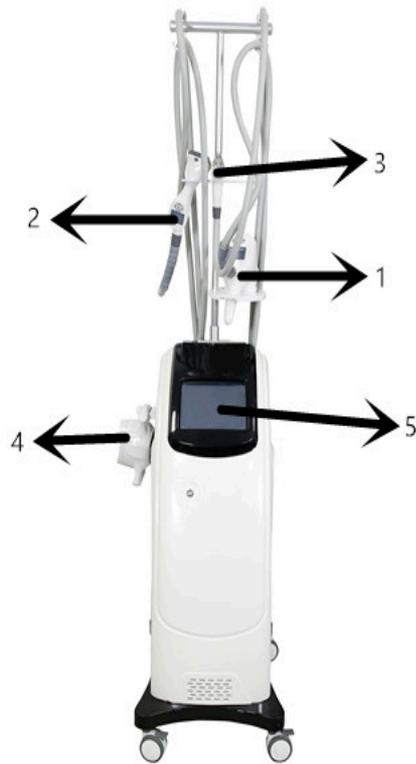


1. Манипула 1 вакуумного массажа + RF по телу
2. Манипула 2 вакуумного массажа+ RF по рукам и ногам

3. Манипула 3 вакуумного массажа+ RF по лицу
4. Манипула 4 УЗ кавитация по телу
5. Цветной сенсорный ЖК дисплей
6. Разъемы для подключения манипул

Манипула 1 вакуумного массажа + RF по телу

1. 1) Управление с помощью клавиш на манипуле 1:
 - А: Нажмите “▲”, “▼” для выбора параметра
 - Б: Нажмите “◀”, “▶” для изменения значений параметра
 - В: Нажмите “Enter” для подтверждения действия
 - Г: Также вы можете менять параметры на главном дисплее
 - Д: Параметры нельзя менять прямо во время работы аппарата
2. 2) Дисплей манипулы 1(см. рисунок)

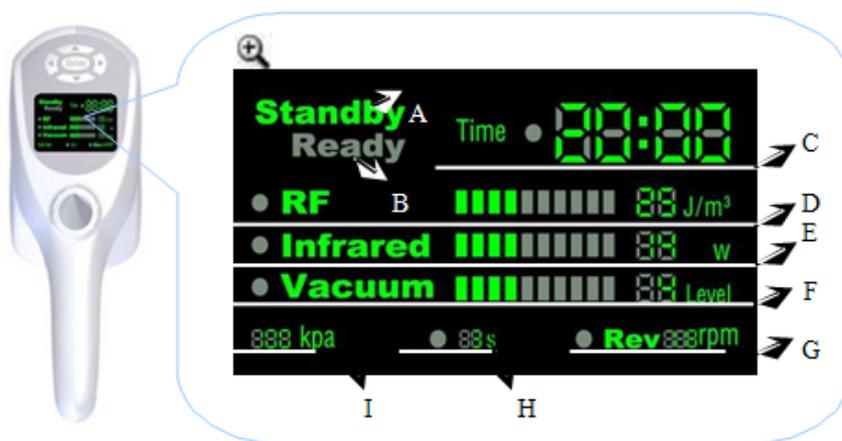

- A) Режим ожидания
- B) Готовность к работе
- C) Время
- D) Энергия RF
- E) Инфракрасное излучение
- F) Мощность Вакуума
- G) Скорость роликов
- H) Режим пульсации
- I) Индикатор давления вакуума

Дисплей манипулы 2(см. рисунок) – управление одинаково с манипулой 1

- A) Режим ожидания
- B) Готовность к работе
- C) Время

- D) Энергия RF
- E) Инфракрасное излучение
- F) Мощность Вакуума
- G) Индикатор давления вакуума
- H) Режим пульсации

Комплектующие аппарата V10

4



Host system×1



NO.1 Hand piece×1



NO.2 Hand piece×1



NO.3 Hand piece×1



Power line×1



40K Cavitation×1

Аппарат
 Манипулы 1,2,3
 Кавитация
 Шнур питания
 Сменные насадки для манипулы 3

Условия работы и технические параметры:

Условия работы на аппарате

- 1) Температура в помещении 10-30 градусов
- 2) Хранить аппарат рекомендуется при температуре не ниже 0
- 3) Влажность до 70%

4) Давление воздуха: 860hPa~1060hPa

5) Избегать долгого попадания прямых солнечных лучей на аппарат

Внимание: Не запускать аппарат, который хранился при температурах до 10 градусов и ниже. Поместите аппарат в комнатную температуру на 2 часа перед запуском.

Технические параметры:

Название	Значение
ЖК дисплей	ЖК дисплей аппарата: 10.4/8" 2) Дисплей на манипулах: Дисплей на манипуле 1: 2.4" Дисплей на манипуле 2: 1.9"
Режим работы	Пульсация
Частота пульсации	0.5s-7.5s
Давление вакуума	1) Абсолютная величина: 80kPa -10kPa (60.8cmHg - 7.6cmHg) 2) Относительное значение: 20kPa -90kPa (15.2cmHg – 68.4cmHg)
Частота вращения роликов	0-36 rpm
Режимы вращения роликов	4 режима
Контроль безопасности	В режиме реального времени
RF частота	1MHz
RF макс энергия	Max: 60J/cm
Длина волны лазера	940nm
Мощность лазера	MAX 20W
Кавитация	40KHz
Кол-во манипул	4
Площадь пятен манипул	4mmx7mm、 8mmx25mm、 30mmx50mm、 40mmx60mm
Потребляемая мощность	750W
Рабочее напряжение	AC230V±10%, 50Hz±1Hz
Вес	72.7KG
Размер упаковки	127*70*75CM
Упаковка	Деревянный ящик
Комплектующие в упаковке	<ol style="list-style-type: none"> 1. Манипула 1 вакуумного массажа + RF по телу 2. Манипула 2 вакуумного массажа+ RF по рукам и ногам 3. Манипула 3 вакуумного массажа+ RF по лицу

	4. Манипула 4 УЗ кавитация по телу 5. Кабель питания
--	---

Безопасность

Обязательно к ознакомлению персоналу и операторам аппарата! ВАЖНО:


- 1) Не смотреть на лазер
- 2) Убедиться в надежности проводки в помещении. Использовать сетевой фильтр
- 3) После использования отключить аппарат от питания
- 4) Не разбирать устройство
- 5) Использовать сеть с заземлением

Начало работы Установка манипул

- 1) Установите акриловые подставки под манипулы (идут в комплекте)
- 2) Установите манипулы в порядке, как показано на рисунке ниже
- 3) Подключите кабель питания
- 4) Включите тумблер питания сзади устройства
- 5) Выберите нужную манипулу (по умолчанию это манипула 1)
- 6) Включите кнопку питания – экран устройства загорится




7) Нажмите «Enter» на манипуле для начала работы

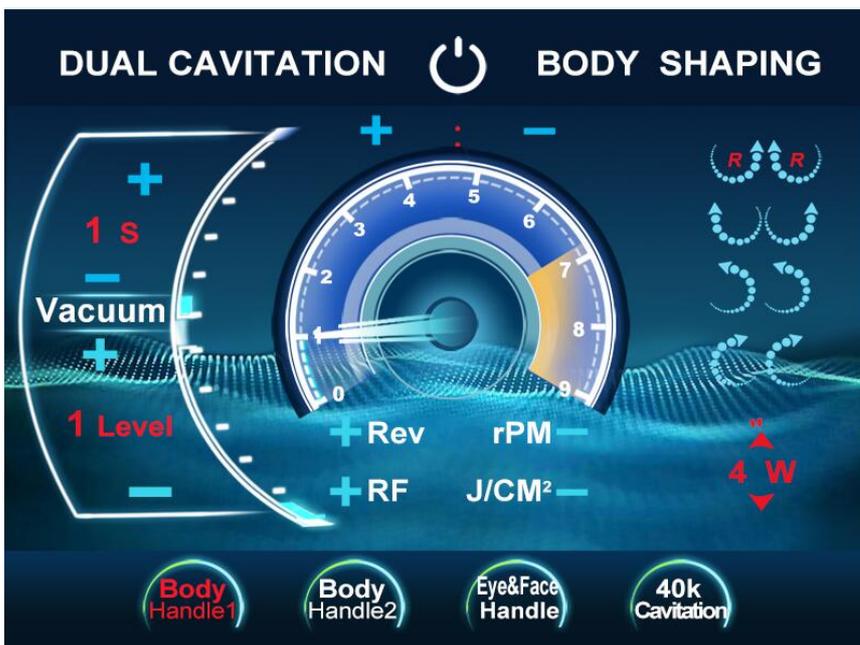

Когда манипула не используется просто отложите её на подставку, не вынимайте манипулы из разъемов во время работы на аппарате.

Настройка параметров на дисплее

- 1) После подключения манипул и питания нажмите на кнопку под экраном
- 2) Через 1 секунду дисплей загорится, и вы увидите рабочий интерфейс устройства

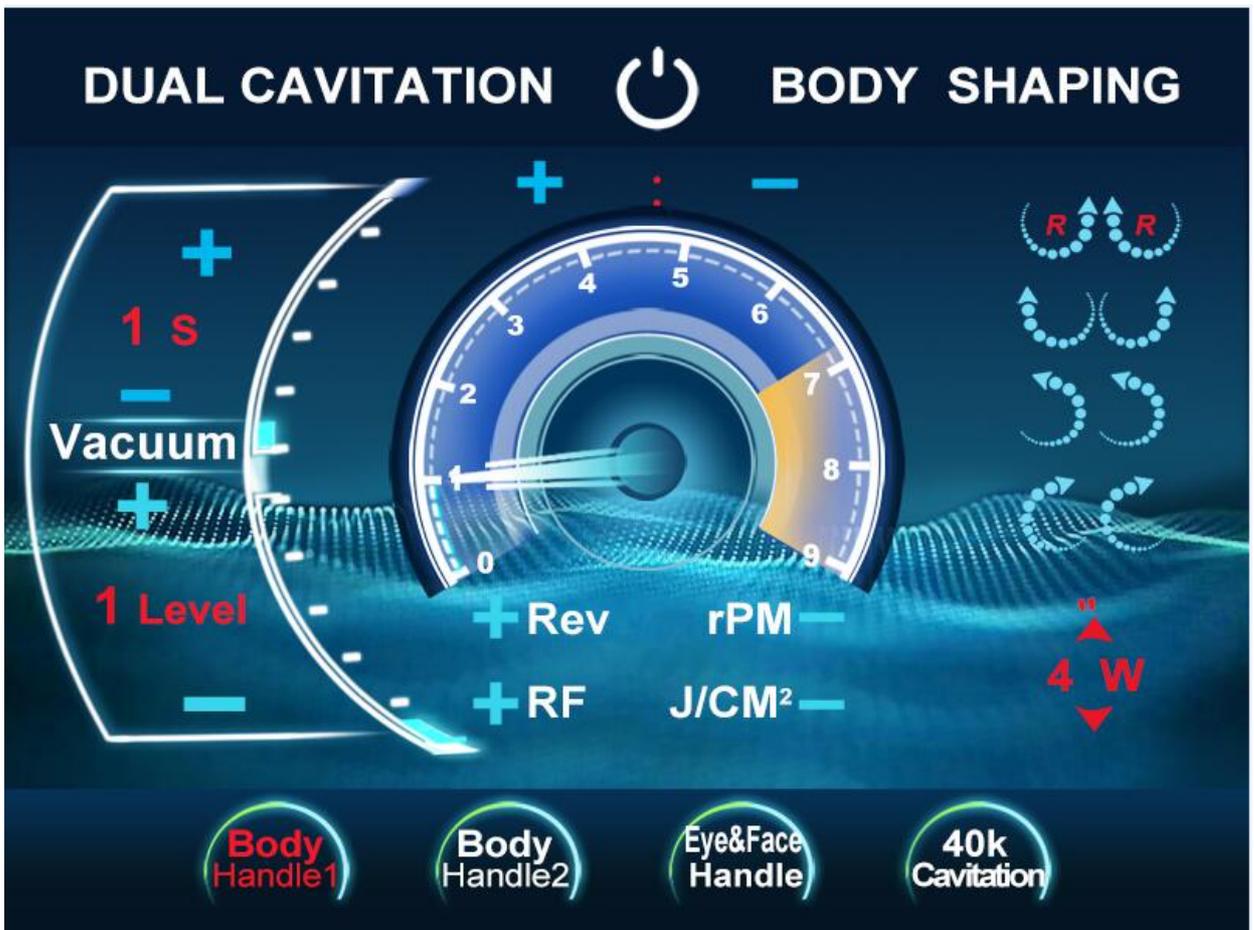

Технические характеристики манипул и базовые настройки

1) Технические характеристики манипул

Манипулы	Мощность ИК лазера	Частота вращения роликов	RF энергия	Уровни вакуума	Частота пульсации
Манипула 1	0~20W	0~36 rpm	0~60J/cm ³	1~9	1s ~8s
Манипула 2	0~20W	нет	0~60J/cm ³	1~9	1s~8s
Манипула 3	0~10W	нет	0~50J/cm ³	1~7	1s~6s
Манипула кавитации	нет	нет	нет	нет	нет

2) Параметры по умолчанию

Манипулы	Мощность ИК лазера	Частота вращения роликов	RF энергия	Уровни вакуума	Частота пульсации
Манипула 1	14W	18 rpm	25J/cm ³	3	3s
Манипула 2	14W	нет	25J/cm ³	3	3s
Манипула 3	6W	нет	25J/cm ³	1	2s
Манипула кавитации	нет	нет	нет	нет	нет

Управление устройством

Внимание: в инструкции приведен пример на основе манипулы 1, управление другими манипулами происходит по такому же принципу.



- 1) Выберите нужную манипулу
- 2) Установите нужные параметры с помощью экранного меню

Управление на манипулах:

нет

Нажмите кнопку ENTER («А») для начала и приостановки работы.



Важно: Выключение аппарата производить только после остановки процедуры!
Отключение шнура питания возможно только через 10 минут после отключения аппарата.


Протоколы процедур:

Принцип воздействия:

- Инфракрасный лазер уменьшает сопротивление кожи, нагревая кожу, а энергия RF проникает глубоко в соединительную ткань. Эта комбинация инфракрасного лазера и проводимой энергии RF увеличивает проникновение кислорода во внутриклеточное пространство, нагреванию кожу, усилению внутритканевого метаболизма.
- Вакуум плюс специально разработанные ролики увеличивают проникновение энергии RF до 5-15 мм вглубь тканей. В то же время, вакуум и ролики механически разминают и втягивают соединительную ткань, эффективно удаляя подкожный жировой слой, удаляя капиллярную сеть, увеличивая лимфатический дренаж, увеличивая метаболизм. Как результат эффективное улучшение контуров тела.
- Применяемые технологии, позволяют энергии RF проникнуть через любые участки кожи, без повреждения и отрицательного воздействия на мягкие ткани, даже при воздействии в области век.

Показания:

- 1) Удаление темных кругов вокруг под глазами, уменьшение "мешков" под глазами;

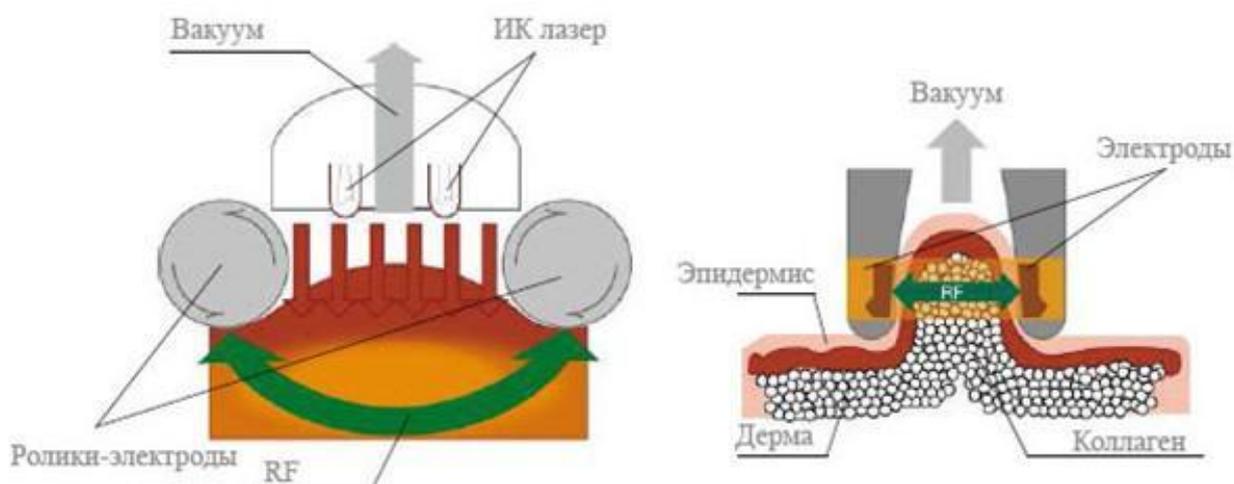

- 2) Лифтинг лица (в том числе лба, верхнего века), удаление морщин;
- 3) Эффективное создание нового контура тела, борьба с целлюлитом;
- 4) Общее снижение веса;
- 5) Восстановительное лечение после тяжелой физической нагрузки, занятий спортом; 6) Борьба с растяжками.

В отличие от аналогичных аппаратов других производителей, работа на аппарате не требует использования специальных костюмов для процедур!!!! Все процедуры проводятся с использованием массажных масел. Также возможно проведение процедур по костюму, но в этом случае будут задействованы только 2 технологии (вакуум и ролики) из четырех (рф и ик-лазер через костюм не проходят).

Противопоказания:

1. беременность и лактация,
2. период менструации,
3. фотосенсибилизация,
4. наличие солнечных ожогов и открытых ран,
5. онкологические заболевания,
6. патология сердца,
7. сахарный диабет,
8. наличие в организме пациентов металлических предметов или кардиостимулятора.

Курсы процедур (для справки):

1. По лицу: каждая процедура длится 30 минут, один раз в неделю. Курс включает в себя 10 процедур.
2. Область глаз: каждая процедура длится 15 минут, один раз в неделю. Курс включает в себя 10 процедур.
3. По телу: каждая процедура длится 45-60 минут, дважды в неделю. Курс включает в себя 10 процедур.
4. По определенным участкам тела: каждая процедура длится 15 минут, дважды в неделю. Курс включает в себя 10 процедур.

Подготовка к процедуре:

1. Приготовьте: Фотоаппарат(опционально), очищающее средство для лица, эфирное масло и спиртовой тампон.
2. Перед процедурой: для того, чтобы клиенту лучше был виден эффект от процедуры, рекомендуем, с согласия клиента, сделать фото До и После, в одинаковых условиях освещенности. За неделю до процедуры клиенту не рекомендуется принимать обезболивающие средства.
3. Проведение процедуры:
 - А) очистите участок кожи клиента для процедуры

- Б) Нанесите массажное масло
 - В) Установите нужные параметры и начните процедуру
4. Настройка параметров: регулируйте параметры, чтобы избежать дискомфорт у клиента. Все зависит от болевого порога и чувствительности кожи.

Курс процедур по лицу:

1. Цель: фейс-лифтинг и подтяжка кожи: каждая процедура длится 30 минут, один раз в неделю. Курс включает в себя 10 процедур.
2. Внимание: уменьшите энергию на 1-2 уровня во время процедур в зоне лба, скул и подбородка. (см таблицу)

Технология	Параметры
RF энергия	20J/ cm ³ -25J/ cm ³
Вакуум	1-2
Время пульсации	1s-2s
Мощность ИК лазера	4W-8W

3. Проведение процедуры:
 - А) очистите участок кожи клиента для процедуры
 - Б) Нанесите массажное масло
 - В) Последовательность процедуры по лицу: челюсть, лоб и верхняя губа
4. Для процедуры по лицу используйте манипулу 3 и следующие параметры:

Технология	Параметры
RF энергия	25J/cm ³ ~35J/cm ³
Вакуум	1-3
Время пульсации	1s-2s
Мощность ИК лазера	6W-10W

- 5) Движения манипулы:



Picture 1

Шаг 1: Подтяжка кожи:

1 Проводите процедуру по линиям, указанным на рисунке (Picture 1)

2 Придерживайте кожу рукой для лучшего натяжения

3 Повторяйте процедуру 2-3 раза

Шаг 2: Делайте дополнительные движения в таких местах как носогубная складка , морщины на лбу, морщины на лице

б) Эффект от процедуры

1. а) Нежная и румяная кожа лица
2. б) Уменьшение морщин на лице
3. с) Подтянутая кожа лица

Курс процедур в области глаз:

1. Эффективность: подтяжка кожи вокруг глаз (век), уменьшение морщин вокруг глаз (гусиные лапки), удаление мешков под глазами и удаление черных кругов вокруг глаз. Процедура производится один раз в неделю, один курс лечения включает десять процедур.
2. Проведение процедуры:
 - А) Очистите участок кожи клиента для процедуры
 - Б) Нанесите массажное масло
 - В) Установите нужные параметры и начните процедуру
3. Для процедуры в области глаз используйте манипулу 4 и следующие параметры:

Технология	Параметры
RF энергия	20J/cm ³ ~25J/cm ³
Вакуум	1
Время пульсации	1s-2s

4. 4) Выполняйте движения как показано на рисунке



Picture 2

5.

1 Проводите процедуру по линиям, указанным на рисунке (Picture 2)

2 Придерживайте кожу рукой для лучшего натяжения

3 Повторяйте процедуру 3-4 раза

6. Эффект от процедуры

а) Может наблюдаться временное покраснение кожи

б) Уменьшение морщин вокруг глаз

с) Лифтинг век

Курс процедур на шею:

1. Эффект: Подтяжка кожи, уменьшение объема, удаление морщин. Одна процедура в неделю, курс включает 10 процедур.

2. Проведение процедуры:

А) Очистите участок кожи клиента для процедуры

Б) Нанесите массажное масло

В) Установите нужные параметры и начните процедуру

3. Для процедуры по лицу используйте манипулу 3 и следующие параметры:

Технология	Параметры
RF энергия	20J/cm ³ ~30J/cm ³
Вакуум	1
Время пульсации	1s-2s
Мощность ИК лазера	6W-10W

4) Выполняйте движения как показано на рисунке

15



Picture 3

5. 1 Проводите процедуру по линиям, указанным на рисунке(Picture 3)
- 2 Придерживайте кожу рукой для лучшего натяжения
- 3 Повторяйте процедуру 2-3 раза
6. Эффект: Подтяжка кожи, уменьшение объема, удаление морщин.

Курс процедур по телу:


1. Эффект: Подтягивание (живот, спина, талия, бедра, икры, руки), контурирование тела, процедуры проводятся два раза в неделю и один курс лечения включает десять процедур.
2. Перед процедурой:
 1. Для того, чтобы клиенту лучше был виден эффект от процедуры, рекомендуем, с согласия клиента, сделать фото До и После, в одинаковых условиях освещённости.
 2. За неделю до процедуры клиенту не рекомендуется принимать обезболивающие средства.
 3. Проведите как показано на рисунке (Picture 4) с нужными параметрами. Мощность можно увеличить, если клиент чувствует себя комфортно.
3. Проведение процедуры:
 - А) очистите участок кожи клиента для процедуры
 - Б) Нанесите массажное масло
 - В) Установите нужные параметры и начните процедуру
4. Для процедуры по лицу используйте манипулу 1 и следующие параметры:

Технология	Параметры
------------	-----------

RF энергия	40J/cm ³ ~60J/cm ³
Вакуум	3-8
Время пульсации	2s-3s
Мощность ИК лазера	10W-20W
Частота вращения роликов	18-30rpm


Внимание: Уменьшайте уровень вакуума и РФ когда процедура идет по талии, животу и ребрам.

5) Принцип проведения процедуры:

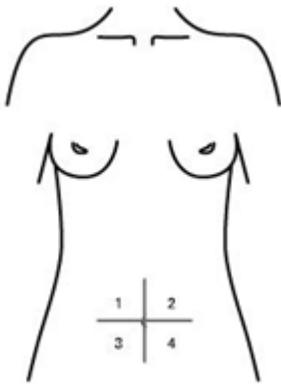


Picture 5

1. Разделите живот на четыре области, повторяйте процедуру на четырех областях, чтобы живот прогрелся.
2. Манипула должна плотно прилегать к коже. Убедитесь в этом, затем нажмите кнопку ENTER на манипуле, либо ножную педаль (опционально). Для паузы так же нажмите кнопку ENTER на манипуле.
3. Изменяйте стиль и уровни мощности в зависимости от состояния клиента.
4. Измеряйте объем талии выше на 3, 6 см и ниже на 3, 6 см пупка. Ведите учет замеров.
5. Направление движений показаны на рисунках ниже (Picture 6-7)

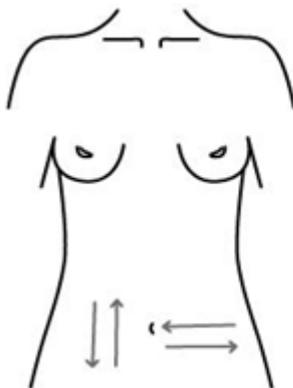

Picture 6

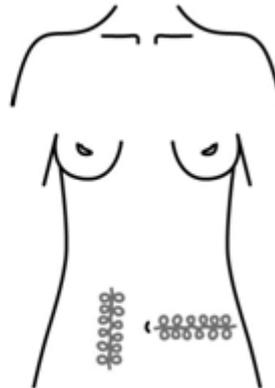


Picture 7

Курс процедур на спине


1. Проведение процедуры:
 - А) Очистите участок кожи клиента для процедуры
 - Б) Нанесите массажное масло
 - В) Установите нужные параметры и начните процедуру
2. Для процедуры по лицу используйте манипулу 1 и следующие параметры:

Технология	Параметры
RF энергия	40J/cm ³ ~60J/cm ³
Вакуум	4-8
Время пульсации	2s-3s
Мощность ИК лазера	10W-20W
Частота вращения роликов	18-30rpm

3) Направление движений показаны на рисунках ниже (Picture 8-9)

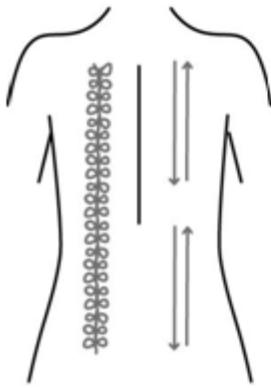

Picture 8

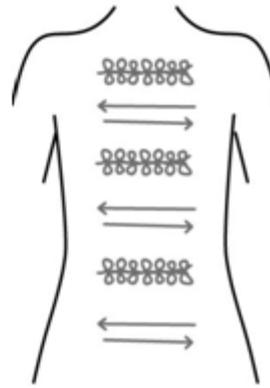

Picture 9

Курс процедур на ногах

1. 1) Проведение процедуры:
 - А) Очистите участок кожи клиента для процедуры
 - Б) Нанесите массажное масло
 - В) Установите нужные параметры и начните процедуру
2. 2) Для процедуры по лицу используйте манипулу 1 или 2 и следующие параметры:

Параметры для манипулы 1

Технология	Параметры
RF энергия	40J/cm ³ ~60J/cm ³
Вакуум	4-8
Время пульсации	2s-3s
Мощность ИК лазера	10W-20W

Частота вращения роликов	18-30rpm
--------------------------	----------

Параметры для манипулы 2


Технология	Параметры
RF энергия	$35\text{J}/\text{cm}^3 \sim 55\text{J}/\text{cm}^3$
Вакуум	3-7
Время пульсации	2s-3s
Мощность ИК лазера	10W-20W
Частота вращения роликов	18-30rpm

3) Направление движений показаны на рисунках ниже (Picture 10-11)
Сначала обработайте внешнюю поверхность бедра: сверху вниз (рисунок 10), слева направо; затем обработайте внутреннюю поверхность бедра.

Курс процедур по плечам:

1) Проведение процедуры:

- А) Очистите участок кожи клиента для процедуры
- Б) Нанесите массажное масло
- В) Установите нужные параметры и начните процедуру

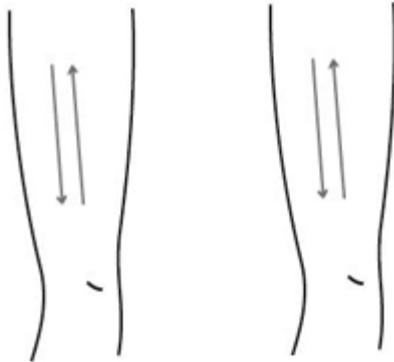

Picture 10

Picture 11

Параметры для манипулы 2

Технология	Параметры
RF энергия	$35\text{J}/\text{cm}^3 \sim 55\text{J}/\text{cm}^3$
Вакуум	3-7
Время пульсации	2s-3s
Мощность ИК лазера	10W-20W
Частота вращения роликов	18-30rpm

Имейте в виду, что подмышки – очень чувствительные области.

После процедур:

- 1) Не использовать холодную воду для мытья в течение 8 часов (исключая лицо)
- 2) Не производить массаж на обработанных областях
- 3) Избегать загара в первую неделю после процедуры
- 4) Разрешено использовать увлажняющие средства для кожи

- 5) Не есть жирную, острую, холодную пищу в течение 8 часов после процедуры