

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Поставщик: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 10, 25135-Brescia, ITALY;
Производитель: ERAL Kaynak Makinalari ve El Aletleri San.Tic.Ltd.Sti.
Izmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.No: 39 Ulucak-Kemalpaşa/Izmir-TURKEY



Аппарат SLIM Beauty технология HIFEM

Модель: **E-022**

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение и область применения

- 1.1. Комплект косметологического оборудования предназначен для коррекции фигуры и стимуляции мышц.
- 1.2. Функциональная способность комплекта одновременно уменьшать подкожно-жировые отложения и воздействовать на глубокие мышцы, увеличивая их и приводя в тонус

2. Комплект поставки

№	Наименование	Количество
1	Воронка на шланг	1 шт.
2	Воронка для слива воды	1 шт.
3	Манипула	2 шт.
4	Шнур питания	1 шт.
5	Паспорт	1 шт.

3. Технические характеристики

№	Характеристика	Ед.изм	Значение
1	Потребляемая мощность	Кw	2.3
2	Индукция магнитного поля	Тесла	0-7
3	Пульс	-	300
4	Размер	См.	57x51x135
5	Вес	Кг.	65
6	Расчетный срок службы (при условии не превышения среднего полного ресурса)	лет	10
7	Номинальный ток предохранителя	А	16

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

№	Характеристика	Ед.изм	Значение
8	Диапазон температур окружающего воздуха	°С	+5 - +40
9	Степень защиты корпуса	-	- IP44
10	Относительная влажность окружающего воздуха, не более	%	80



1 – приборная панель; 2 –манипулы; 3 – корпус; 4 – колеса; 5 – вентиляция; 6 – держатель подводящих шлангов

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



левой стороны. Первое из которых (1) это вентиляционное отверстие, второе (2) предназначено для залива жидкости в аппарат и третье это самое нижнее (3) предназначено для слива воды.

3.2. посередине в нижней части находится красный тумблер включения и выключения аппарата, а также отверстия для подключения кабеля к стабилизатору напряжения (5).

необходимо подключать аппарат через стабилизатор напряжения во избежание скачков электросети

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

4. Требования по технике безопасности

- 4.1. Перед началом эксплуатации косметологического аппарата следует внимательно ознакомиться с настоящим паспортом и следовать его требованиям и рекомендациям.
- 4.2. При работе с аппаратом необходимо выполнять требования правил электрической и пожарной безопасности.
- 4.3. Перед включением аппарата в сеть следует убедиться в исправности шнура, вилки, розетки и отсутствии механических повреждений аппарата.
- 4.4. При проведении процедур надлежит обеспечивать достаточное освещение рабочего места и рабочее пространство вокруг аппарата. Не допускается загромождение рабочего пространства посторонними предметами.
- 4.5. Не допускается использование аппарата в помещениях со скользким полом.
- 4.6. Запрещается эксплуатация аппарата в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%.
- 4.7. Помещение, в котором проходит проведение процедур, надлежит периодически проветривать.
- 4.8. Включённый аппарат не должен оставаться без присмотра. Прежде чем покинуть рабочее место, необходимо выключить аппарат, отсоединить шнур от сети и дождаться полного выключения.
- 4.9. При случайном нарушении изоляции токоподводящего шнура дальнейшая работа с аппаратом должна быть немедленно прекращена до устранения возникшей неисправности.
- 4.10. Запрещается работать с аппаратом при отсутствии заземления.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- 4.11. Следует оберегать шнур питания от попадания масла, воды, повреждения об острые кромки и прикосновения к нагретым поверхностям.
- 4.12. Перед проведением процедуры обязательна дезинфекция рабочих манипул оборудования.
- 4.13. Запрещается изменять конструкцию аппарата и его сменного оборудования
- 4.14. Запрещается работать с аппаратом лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- 4.15. Запрещается эксплуатировать аппарат при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:
- нечеткая работа выключателя;
 - повреждение штепсельного соединения кабеля (шнура) или его защитной трубки;
 - повреждение рабочей поверхности манипул.
 - появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
 - поломки или появления трещин в корпусе или рукоятке;
 - повреждение крепления
- 4.16. Косметологический аппарат должен быть отключен от сети в следующих случаях:
- при смене и установке манипул;
 - при длительном перерыве работы;
 - при окончании работы или смены.
- 4.17. Запрещена эксплуатация аппарата без залива охлаждающей дистиллированной воды в бак охладителя (в зависимости от модели).

**4.18. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ В СЕТЬ, НЕ ИМЕЮЩУЮ
ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ПРОВОДНИКА**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

5. Указания по работе с аппаратом

- 5.1. Выбор пола клиента: мужчина или женщина
- 5.2. Зона проработки: пресс, плечи и руки, ягодицы, голени, бедра
- 5.3. Тип тренировки:
- Тренировка для похудения
 - Тренировка для наращивания мышц
 - Тренировка на силу и выносливость
 - Комбинированная. Первая комбинированная тренировка предназначена для похудения и наращивания мышц, вторая комбинированная тренировка предназначена для наращивания мышц, силы и выносливости
- 5.4. Интенсивность воздействия (10 ступеней)
- 5.5. Время работы (стандарт на 30 минут)
- 5.6. Время каждого цикла тренировки, кроме заминки и разминки (пять минут)
- 5.7. Частота сокращений меняется в зависимости от выбранной зоны, типа тренировки и пола клиента
- 5.8. Циклы тренировки во время процедуры меняются автоматически
- 5.9. Для обработки аппликаторов и поверхности аппарата после процедуры использовать дезинфицирующие спиртовые средства
- 5.10. Не есть за 1 час до процедуры.
- 5.11. Нельзя носить никаких металлических предметов во время процедуры.
- 5.12. Место проведения операции и манипулы должны быть сухими.
- 5.13. Рабочая энергия манипулы варьируется от человека к человеку, постепенно увеличиваясь от низкого уровня энергии.
- 5.14. Общее время процедуры в день не должно превышать 1,5 часа, а одна часть тела - не более 1 часа.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- 5.15. Не кладите какие-либо электронные изделия или металлические предметы на рабочий инструмент.
- 5.16. Не ешьте и не пейте воду во время работы. Попробуйте есть через 1 час после операции (пейте больше воды и ешьте продукты с высоким содержанием белка).

6. Содержание процедуры в зависимости от времени процедуры:

Время процедуры	Растяжка	Разминка	Интенсив	Заминка
30 мин	1 мин	5 мин	4 группы по 5 мин	4 мин
25 мин	1 мин	5 мин	3 группы по 5 мин	4 мин
20 мин	1 мин	5 мин	2 группы по 5 мин	4 мин
15 мин	1 мин	5 мин	1 группа по 5 мин	4 мин
10 мин	1 мин	5 мин	--	4 мин
5 мин	1 мин	--	--	4 мин

7. Указания по эксплуатации

- 7.1 Косметологический аппарат должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями данного паспорта.
- 7.2. По окончании работ протрите дезинфицирующими спиртовыми средствами аппарат и все его комплектующие.
- 7.3. При очистке насадок не используйте абразивные средства, растворители и другие агрессивные вещества, чтобы не повредить покрытие

8. Условия хранения и транспортировки

- 8.1. Аппарат должен храниться в индивидуальном ящике в сухом, отапливаемом и чистом помещении, недоступном детям, при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 80%.
- 8.2. Изделия должны храниться по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.
- 8.3. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

9. Утилизация

9.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

9.2. Содержание благородных металлов: нет

10. Гарантийные обязательства

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие комплекта изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.

10.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

10.4 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

11. Условия гарантийного обслуживания

11.1 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

11.2 Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

11.3 Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

11.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

11.5 Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара

Аппарат для коррекции фигуры и стимуляции
мышц Beauty Slim E-022

№	Модель	Количество, к-т
1	Beauty Slim E-022	
2		

Название и адрес торговой организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать
торговой организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии **СОГЛАСЕН:**

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

**Гарантийный срок – Двенадцать месяцев с даты продажи
конечному потребителю**

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в
сервисный центр по адресу: _____

Россия, Москва, Москва, пос.Малаховка, Касимовское

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара: _____

Дата: « ____ » _____ 20 ____ г. Подпись _____

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013